



*Sshh..*  
*Sshh..*

tengo un secreto..

**ideal** Leone  
© LIGHT LINGUAL SYSTEM

El sistema lingual **Ideal Leone** ha sido expresamente creado para tratar pacientes con malposiciones leves o recidivas, que desean mejorar su sonrisa con un tratamiento invisible, predecible y rápido.



- Los brackets del sistema lingual **Idea-L** tienen dimensiones mesio-distales mínimas y un espesor de sólo 1,4 mm para asegurar el confort y no alterar la fonación del paciente desde el primer día de tratamiento. El diseño especial de estos brackets simplifica el posicionamiento de la ligadura **Slide™** y garantiza el mantenimiento de la posición durante la terapia.



- El uso de la ligadura **Slide™** presenta múltiples ventajas:
  - **Slide™** se integra en el perfil del bracket haciéndolo libre de asperezas
  - **Slide™** aprovecha las ventajas de la biomecánica Low Friction aplicando fuerzas ligeras
  - **Slide™** reduce los tiempos terapéuticos.



- En la mayoría de los casos el uso de un alambre redondo **Memoria®** .012" es suficiente para obtener la solución del apiñamiento y la mejora estética de la sonrisa. En presencia de rotaciones dentales y/o malposiciones más marcadas se pueden utilizar tanto alambres de dimensiones mayores, **Memoria®** o Beta **Memoria®**, como ligaduras convencionales de fricción para aumentar el control biomecánico.




- El sistema **Idea-L**, estudiado para una biomecánica 2D con el uso de sólo alambres redondos, no requiere difíciles y costosas elaboraciones de modelos.



- Para obtener perfectos alineamiento y nivelación de los dientes anteriores es necesario un posicionamiento cuidadoso de los brackets; es aconsejable por lo tanto una técnica indirecta tanto con cubetas de transferencia realizadas en laboratorio como con los "Jig" expresamente ideados.

- La serie de altímetros de plástico es realizada en seis medidas para permitir la elección de la posición más correcta, en virtud de la anatomía de la superficie lingual del diente.

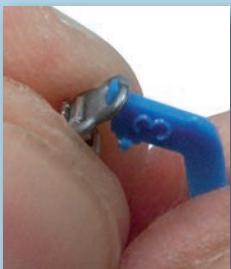


- Unión del altímetro al bracket que tiene la ligadura **Slide** aplicada en la aleta gingival




- Comprobación sobre el modelo de la medida del altímetro elegido



- Posicionamiento en boca y polimerización del adhesivo

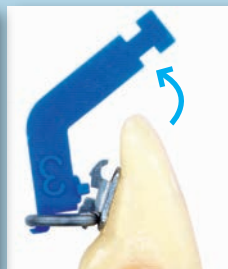

- Remoción del altímetro con un movimiento de rotación

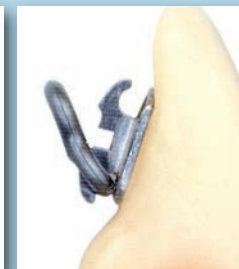

- **Bracket sin "Jig" con la ligadura Slide aplicada en la aleta gingival**



- Bracket con el alambre introducido y la ligadura **Slide** posicionada



..llevo  
un aparato  
ortodóntico..

¿lo dirías?

ideal Leone  
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

Inicio del tratamiento



Resultado clínico a los 3 meses



- Cosmética ortodóntica de la sonrisa rápida e invisible para la cura de malas posiciones leves y recidivas
- Biomecánica Low Friction 2D para alinear y nivelar los dientes anteriores en pocas semanas
- Brackets de reducidas dimensiones y espesor, utilizados con ligaduras *Slide*<sup>TM</sup>, aseguran el máximo confort para el paciente
- Posicionamiento práctico y preciso con el especial sistema de transferencia
- Eficaz alternativa a los aligners transparentes
- Máximo respeto por la fonación
- Mínima colaboración del paciente

Inicio del tratamiento




Resultado clínico a los 3 meses



SISTEMA IDEA-L				
		torque	angul.	 .018"
			0°	$\frac{1}{1}$  1  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{2}{2}$  2  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{3}{3}$  3  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{4}{4}$  4  <b>F4984-04</b>
			0°	$\frac{1}{1}$  1  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{2}{2}$  2  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{3}{3}$  3  <b>F4980-04</b>
			0°	$\frac{4}{4}$  4  <b>F4984-04</b>

## Brackets C.D. linguales IDEA-L

Confecciones de 5 piezas

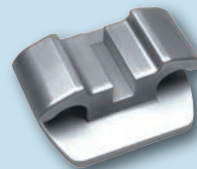


## F4980-91 Kit brackets linguales IDEA-L

El kit contiene:  
8 brackets (una arcada) y  
12 ligaduras *Slide*<sup>TM</sup> extra-small,  
color plata



ALTÍMETROS PARA BRACKETS LINGUALES		
medida	código	
1	<b>F4900-01</b>	conf. 20
2	<b>F4900-02</b>	
3	<b>F4900-03</b>	
4	<b>F4900-04</b>	
5	<b>F4900-05</b>	
6	<b>F4900-06</b>	

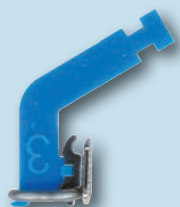

## F4900-60 Kit altímetros para brackets linguales IDEA-L


Confección surtida de 120 piezas



## K6264-10 Ligaduras *Slide*<sup>TM</sup> extra-small - color plata

Confección de 10 módulos de 6 ligaduras cada uno

ARCOS LINGUALES MEMORIA®				conf. 2
Ø inch	pequeños	medianos	grandes	
.012	<b>C4950-12</b>	<b>C4951-12</b>	<b>C4952-12</b>	
.014	<b>C4950-14</b>	<b>C4951-14</b>	<b>C4952-14</b>	
ARCOS LINGUALES BETA MEMORIA®				conf. 2
.016	<b>C4970-16</b>	<b>C4971-16</b>	<b>C4972-16</b>	

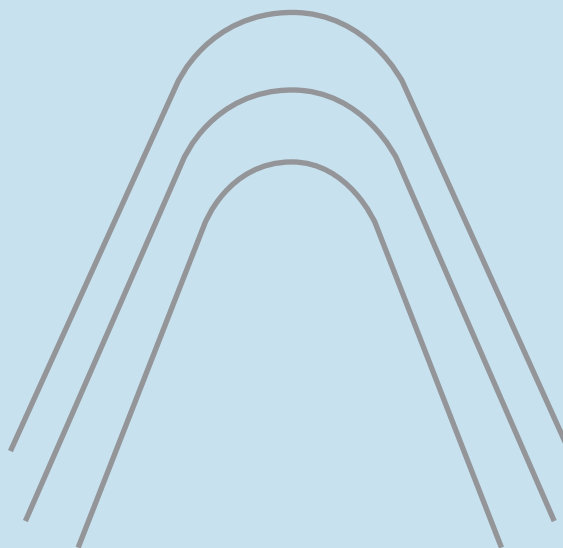

## LEONE S.p.a Ortodondia e Implantología

Via P. a Quaracchi, 50 - 50019 Sesto Fiorentino - FIRENZE (Italia)  
Tel. +39.0553044620 Fax +39.055304405 info@leone.it www.leone.it