

Procedura attivazione domiciliare

Home Activation Procedure

Far aprire bene la bocca ed inserire l'apposita chiave con manico nel foro anteriore visibile della vite (Fig. 1-2) Open mouth wide and carefully insert the swivel key into the hole in the middle of the appliance. (Fig. 1-2)

Spingere la chiave in modo progressivo verso la parte posteriore della bocca del bambino fino a percepire lo stop al movimento rotatorio. Successivamente sfilare la chiave avendo cura di evitare la disattivazione. (Fig. 3-4)

Steadily push the key toward the back of the mouth until you feel the rotation stop. Carefully remove the key once rotation is completed. (Fig. 3-4)

Se prescritto dal clinico, ripetere la procedura per altre nere ulteriore espansione. Repeat as prescribed by clinician.

Istruzioni


per attivare l'espansore rapido del palato

Instructions


to activate the rapid palatal expander




ISTR.78/12-16 December 1,2016

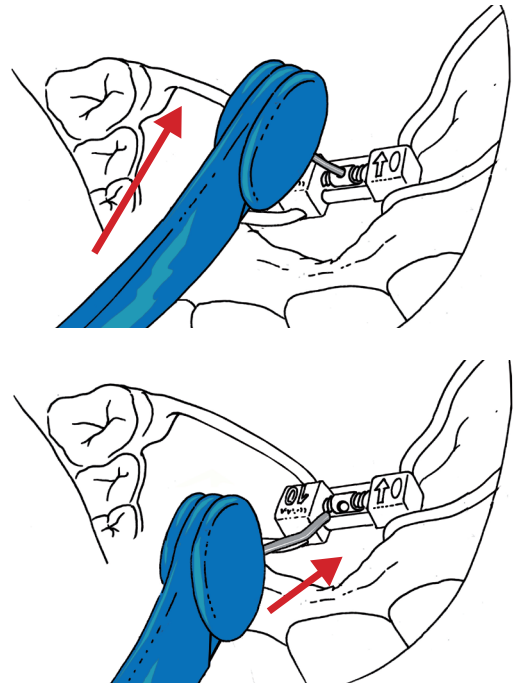


1

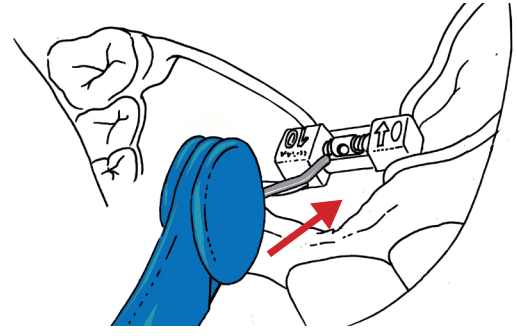

2

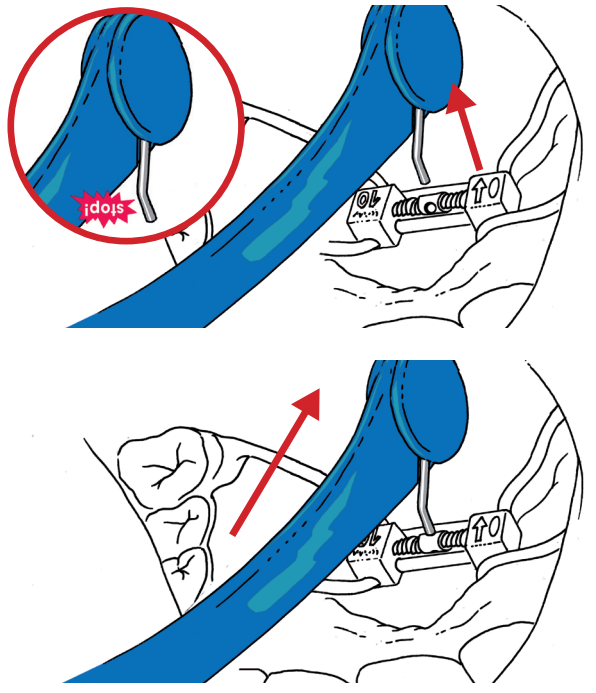

3

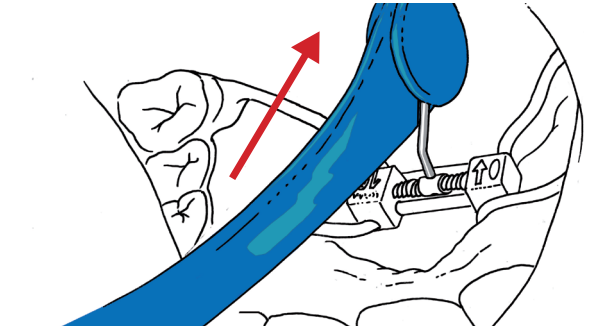

4

Nome
First Name _____




Cognome
Last Name _____







Età _____ **Sesso**
Age Gender M F

Data di applicazione espansore
Date of Appliance Fitting _____ / _____ / _____

Massime attivazioni consentite:
Maximum Activations Allowed: _____

Prescrizione Prescription

							
1				16			
2				17			
3				18			
4				19			
5				20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			

Segnare sulla scheda il numero di attivazioni effettuate. Mark the number of activations completed on this table.