



Cómo importar bibliotecas
Leone_XCN en **Dental Wings**[®]

1. Abrir la aplicación DW Client

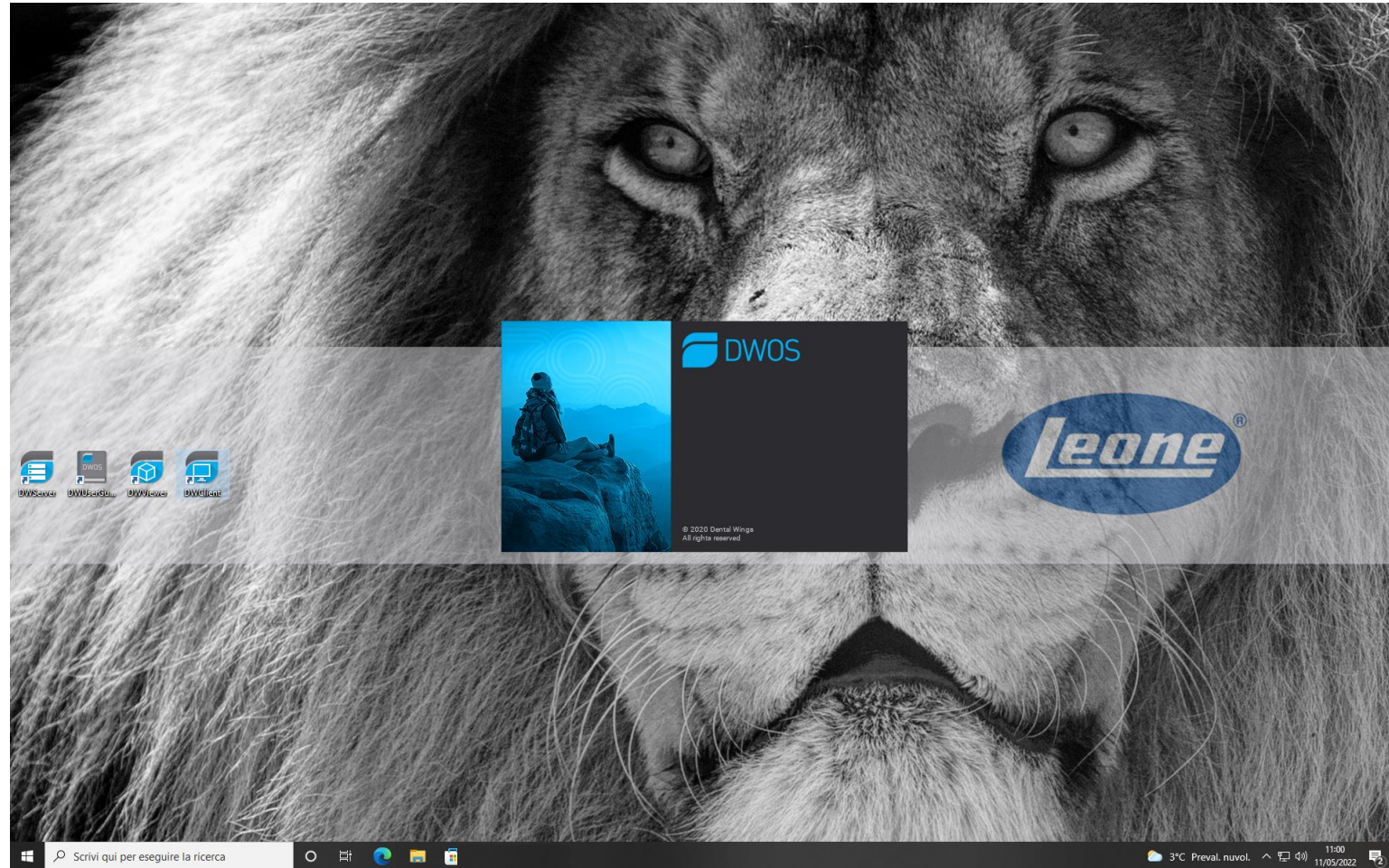


Cómo importar
bibliotecas
Leone_XCN en
Dental Wings®


2. Seleccione "Aplicaciones"

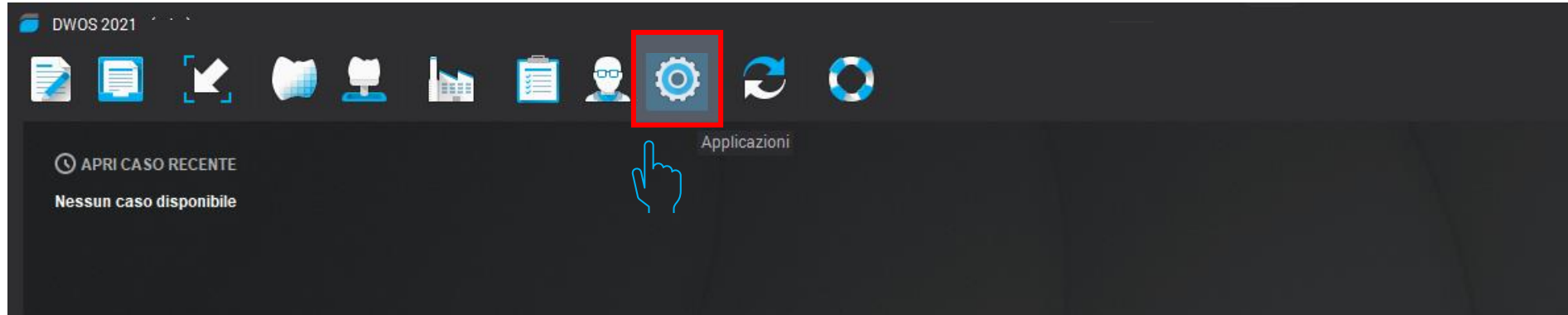


3. Seleccione "Kit de implantes"

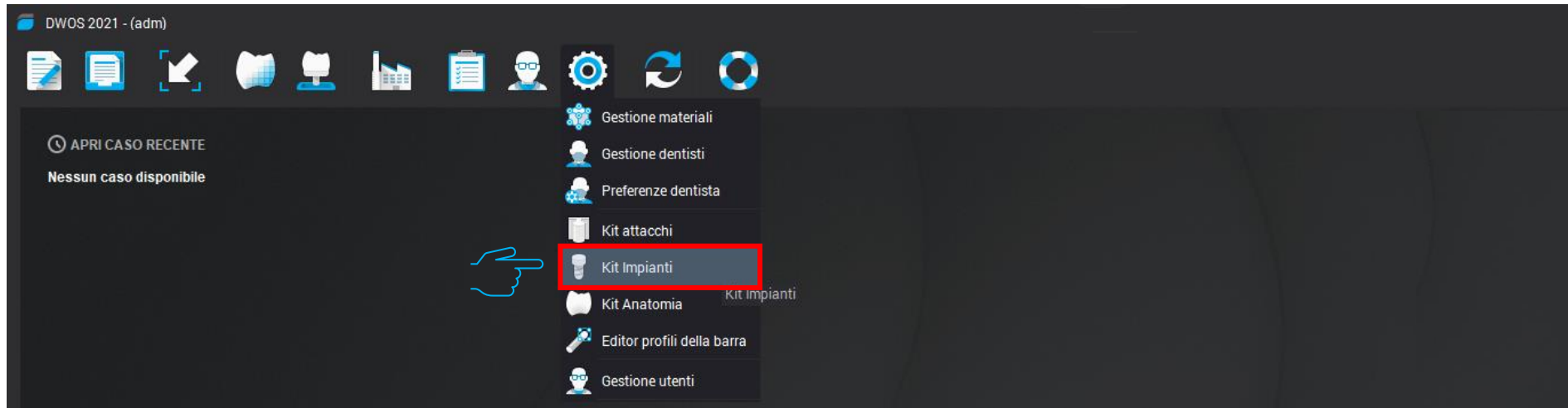


4. En el menú desplegable del kit de implantes, seleccione
"Importar kit Fabricante de implantes "

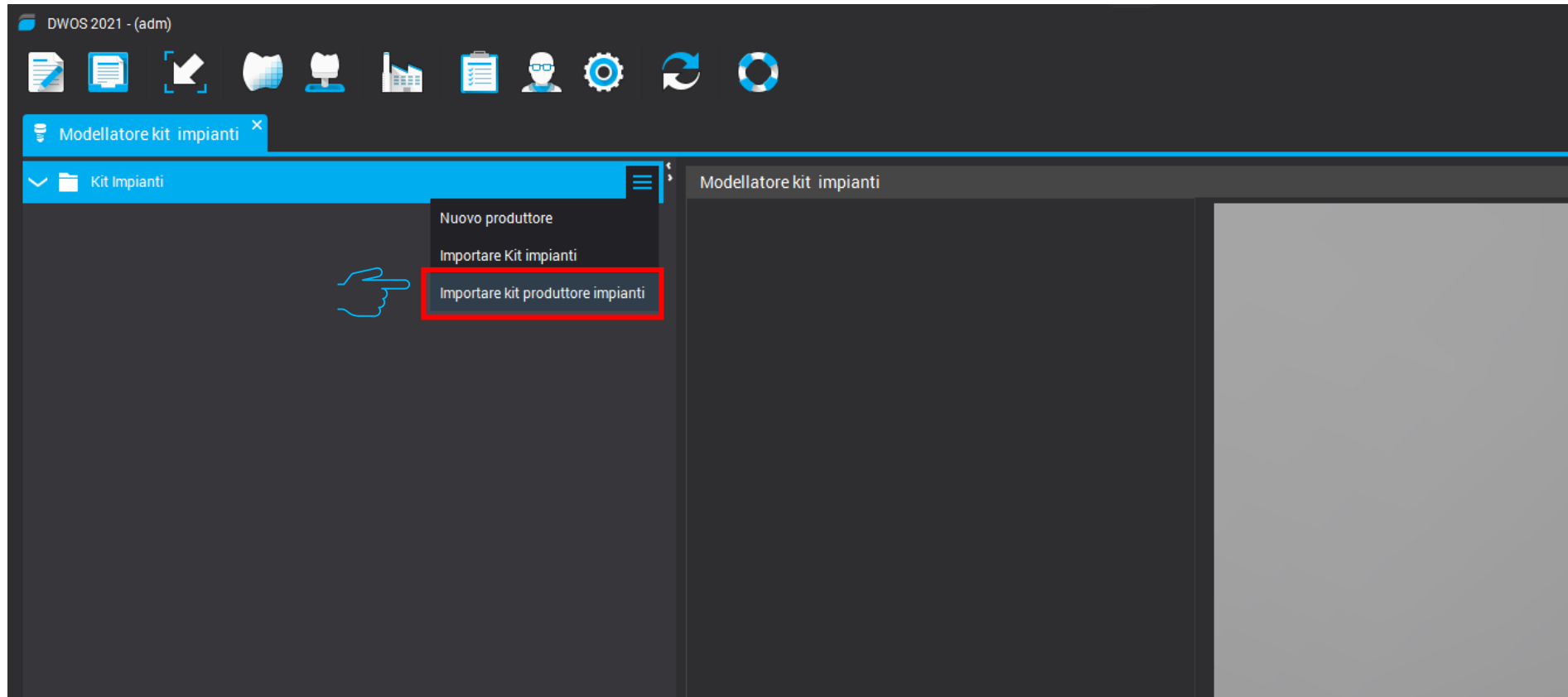

5. Seleccione la carpeta comprimida "**Leone-XCN-AAA.zip**".
Que puede descargar directamente en la pagina web de Leone
<https://www.leone.it/espanol/implantologia/>

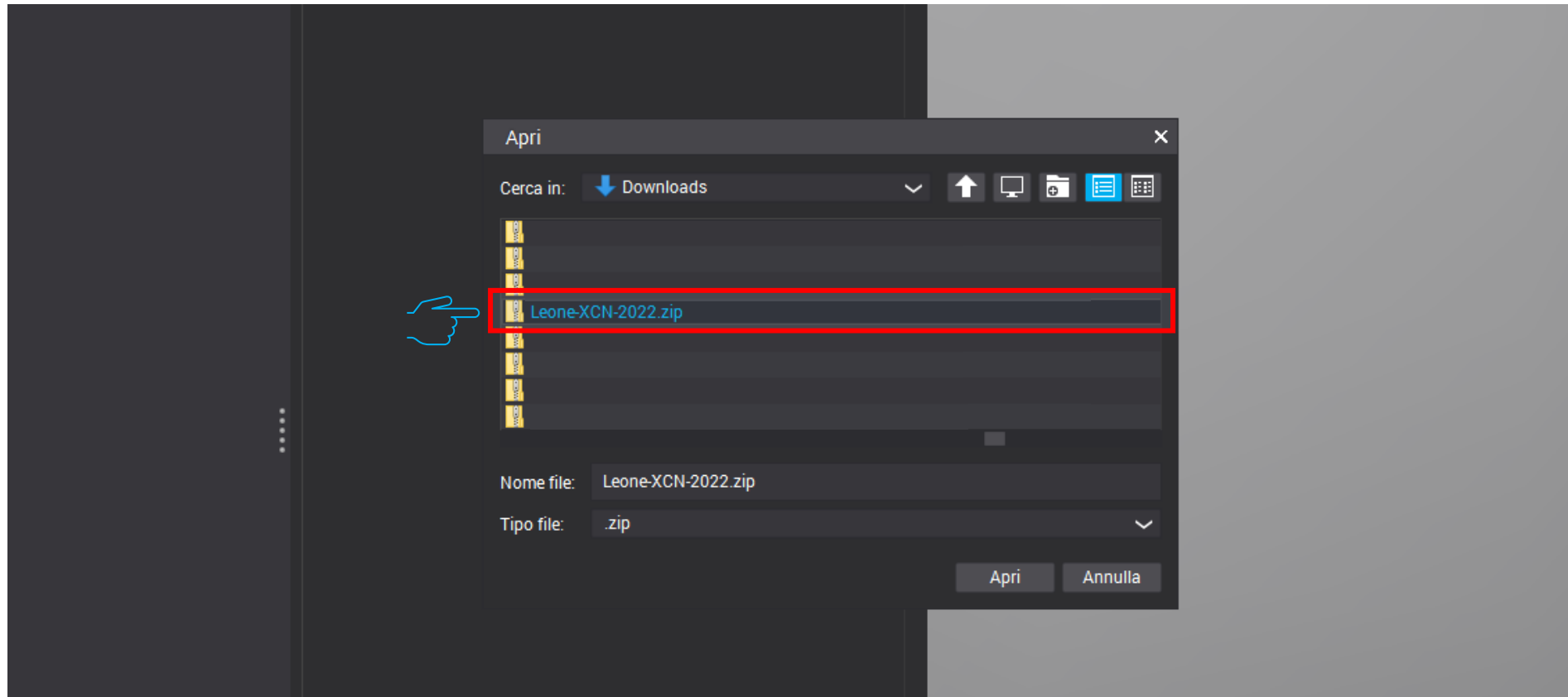

6. Las bibliotecas de Leone al final del procedimiento están activas en el software

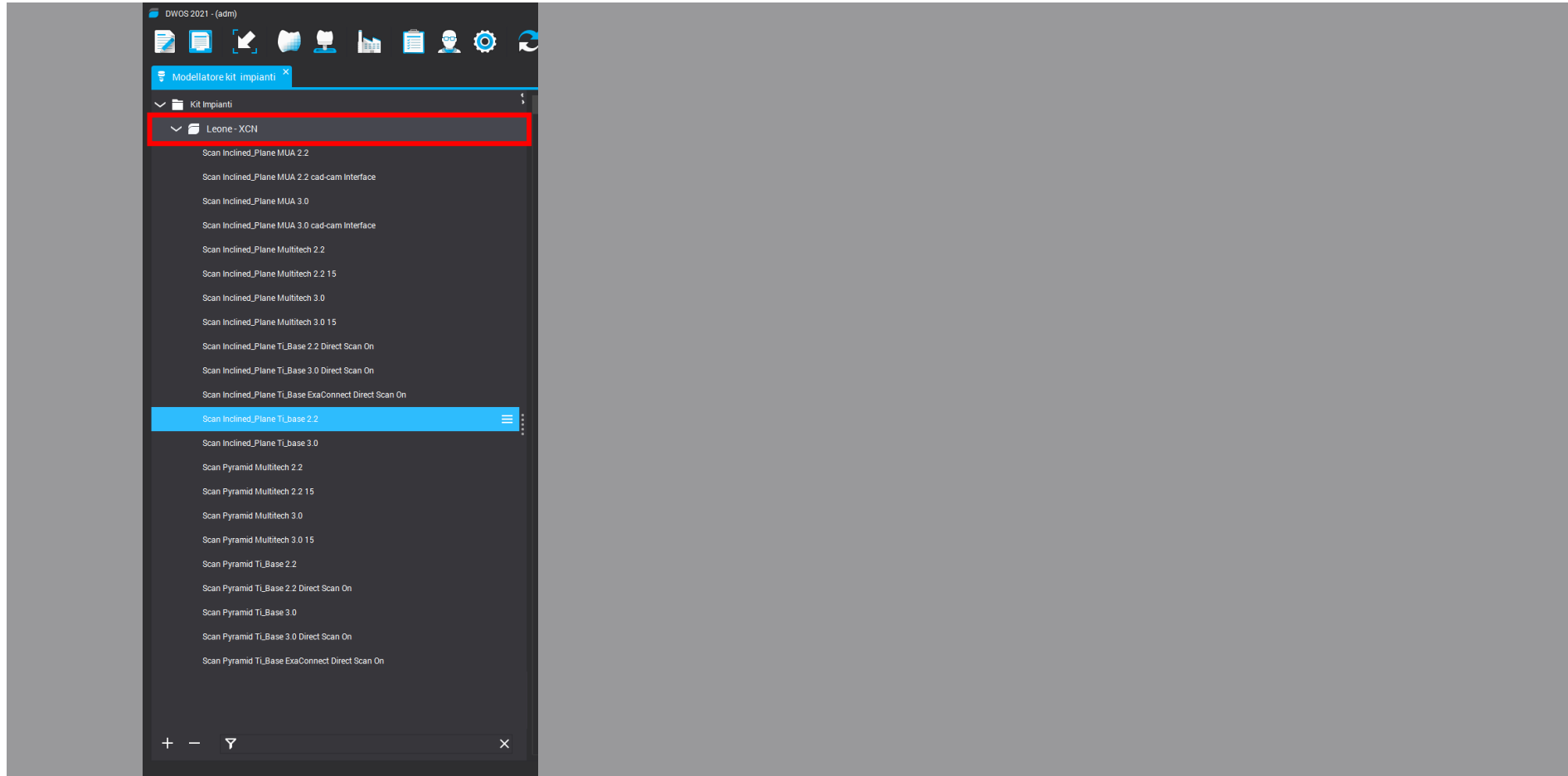

Cómo importar
bibliotecas
Leone_XCN en
Dental Wings®