



Protocollo uso elastici per protrazione del mascellare superiore

Leone

∅ interno



3/16" - 4,8 mm

1/4" - 6,4 mm

5/16" - 7,9 mm

3/8" - 9,5 mm

1/2" - 12,7 mm

forti

8 oz - 224 gr

K0932-08

K0933-08

K0934-08

K0935-08

K0936-08

extraforti

14 oz - 392 gr

K0942-14

K0943-14

K0944-14

K0945-14

K0946-14

**PIANO
OCCLUSALE**

uncino della ferula

30°

appoggio mentoniero
della maschera

supporto per l'elastico
della maschera

F

PROTOCOLLO

A TEMPO PIENO PER I PRIMI 4-6 MESI FINO
IPERCORREZIONE 4-5 MM DVJ DI NOTTE PER
ALTRI 6 MESI

- 8 ONCE PRIME 2 SETTIMANE
- DOPO LE PRIME 2 SETTIMANE 14 ONCE

Per la scelta dell'elastico:

- verificare la distanza esistente tra l'uncino della ferula e il supporto per l'elastico della ferula
- dividere la distanza per 3 per ottenere così il diametro dell'elastico da usare
- cercare nelle colonne della tabella il diametro ottenuto e nelle righe la forza desiderata così da ottenere il tipo corretto di elastico da usare.

Avvertenza: fare attenzione a una corretta inclinazione degli elastici a 30° sul piano occlusale - fare attenzione a possibili decubiti sui punti di appoggio