


GO
to

CORRECTOR PARA CLASE II LEONE

EL NUEVO DISPOSITIVO SIN NECESIDAD DE
COOPERACIÓN POR PARTE DEL PACIENTE
PARA CORRECCIÓN DE LAS CLASES II

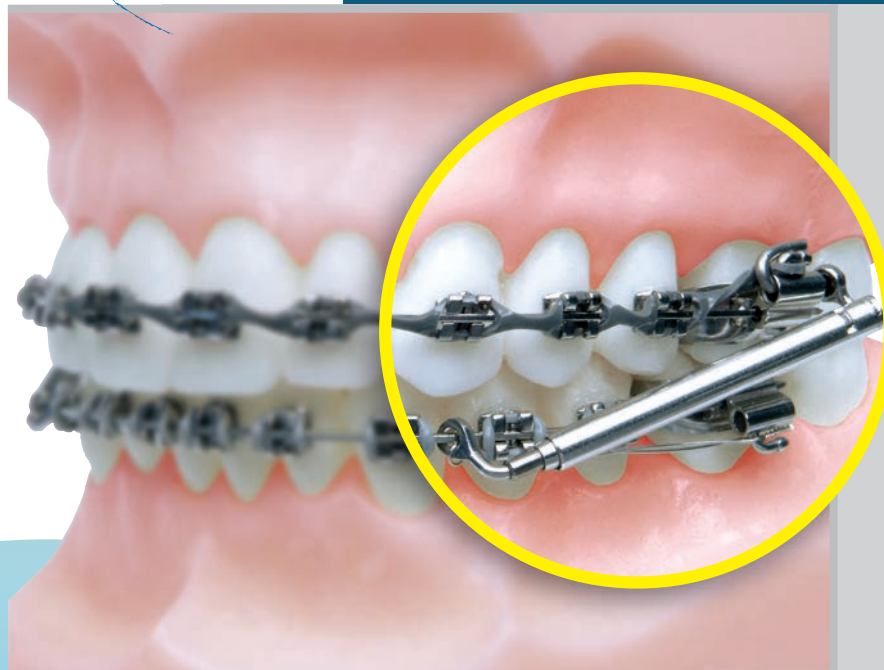

Las dimensiones
reducidas y el
resorte interior
del dispositivo
garantizan un óptimo
confort al paciente




Por Cortesía del Dr. Ivano Maltoni

Disponible en 3 dimensiones con posibilidad de
apoyo mesial o distal al tubo molar superior por
un total de 6 posiciones posibles en la boca

Utilizado con apoyo mesial se puede posicionar
sobre un tubo solo cementado directo sin
necesidad de la banda y del tubo redondo

Estimulo fisiológico al avanzamiento mandibular
gracias a la fuerza constante y ligera desarrollada
por el resorte **MEMORIA**® 200 gr.

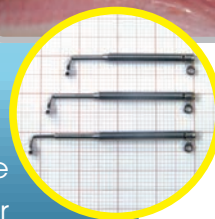


ORTODONCIA e IMPLANTOLOGÍA

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DEL CORRECTOR PARA CLASE II CON APOYO MESIAL AL TUBO VESTIBULAR



PROCEDIMIENTO DE MONTAJE CON ANCLAJE DISTAL EN EL TUBO VESTIBULAR

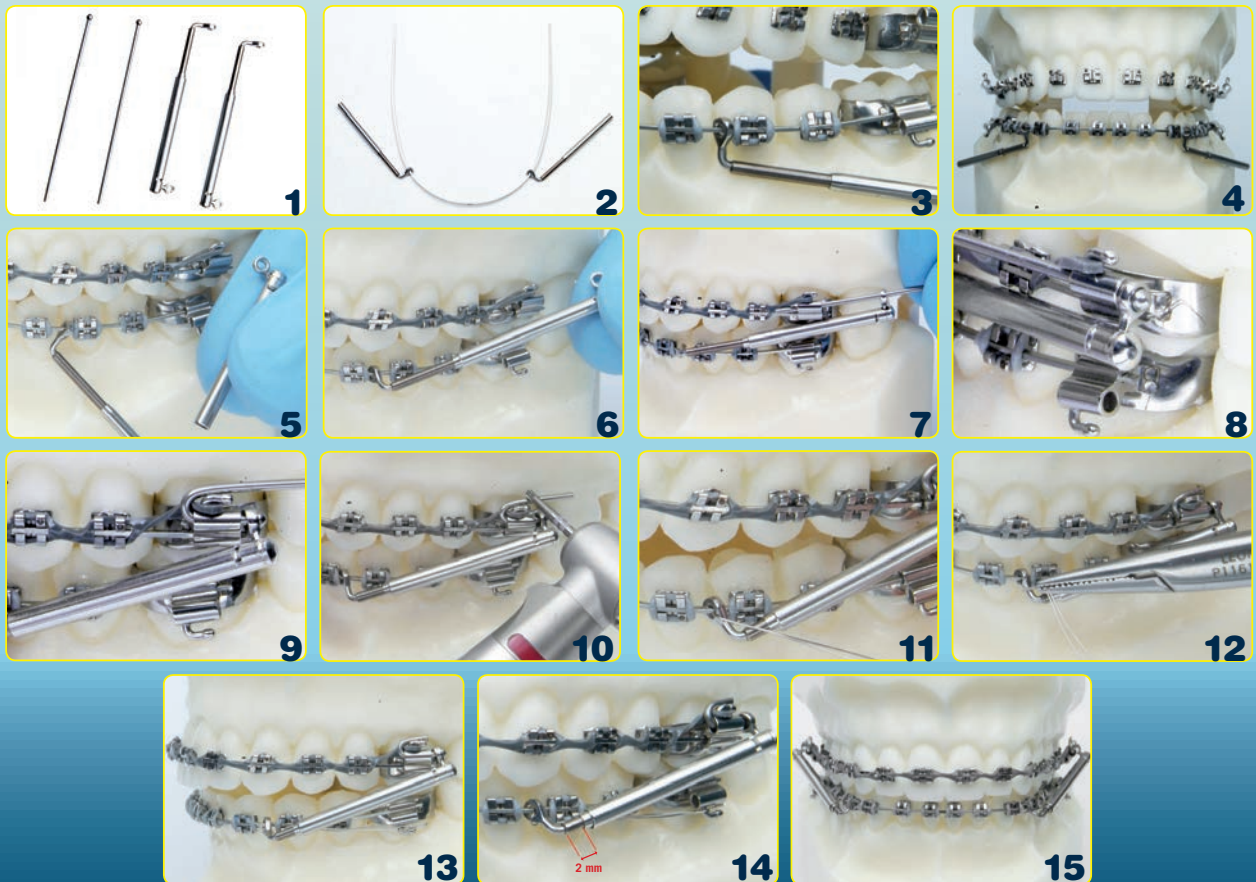

Las confecciones incluyen todos los accesorios necesarios para el posicionamiento de un corrector bilateral

Modelo	Longitud a la máxima extensión (configuración pasiva)	Longitud a la máxima compresión (Incluidos 2 mm para la expansión mínima recomendada)	Elongación máxima del resorte	Máxima apertura permitida para evitar el desenganche
M2300-00	Extra-corto 31mm	25mm	7,5mm	48mm*
M2300-01	Corto 35mm	28mm	10mm	56mm*
M2300-02	Largo 40mm	31mm	10mm	62mm*

*Distancia entre los 2 anillos de anclaje



LEONE S.p.a. Ortodoncia e implantología

Via P. a Quaracchi, 50 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - Italia - info@leone.it www.leone.it

Departamento de Exportación:

Tel: +39.055.3044620 Fax: +39.055.304405

E-mail: export@leone.it