

INTRA-EXTRAORALI



M




CORRETTORE DI CLASSE II

Il dispositivo no-compliance per la correzione delle Classi II.

Le dimensioni ridotte del dispositivo garantiscono un ottimo comfort per il paziente mentre la forza costante e leggera sviluppata dalla molla **MEMORIA**® da 200 gr., presente all'interno del pistone, stimola l'avanzamento mandibolare.

In questa nuova versione la fluidità del movimento telescopico e la robustezza del meccanismo risultano migliorati.


Le confezioni sono composte da tutti i particolari utili per l'applicazione di un correttore bilaterale.

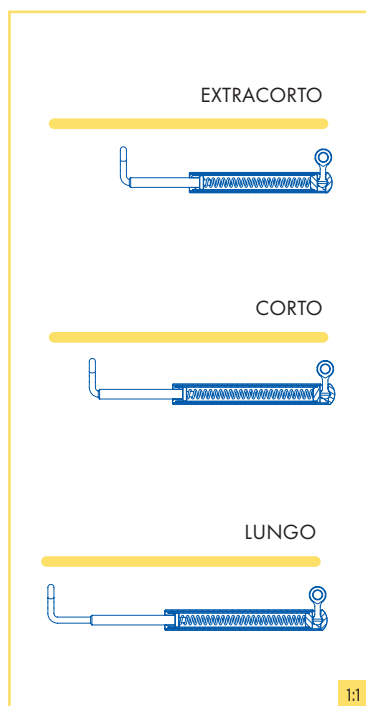

Disponibile in **3 lunghezze** con possibilità di aggancio mesiale e distale al tubo molare superiore, per un totale di 6 possibili posizioni in bocca. Utilizzato con l'appoggio mesiale può essere posizionato anche su un tubo singolo direct bonding senza la necessità della banda e del tubo tondo.

appoggio mesiale

al tubo vestibolare

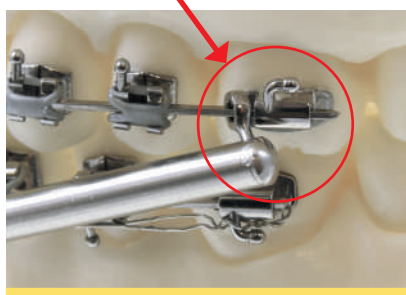

ancoraggio distale

al tubo vestibolare



Per evitare rotture, il correttore non deve essere montato completamente compresso:

una volta posizionato in bocca, in occlusione abituale, deve essere visibile una porzione del pistone che fuoriesce dal tubo di almeno **2 mm**.




*BREVETTATO

Disponibile in 2 versioni:

1 con occhio anteriore



2 con gancio anteriore

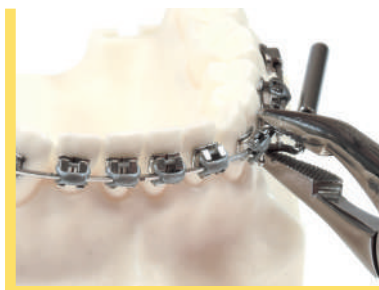

CON OCCHIELLO ANTERIORE	CON GANCIO ANTERIORE	Tipologia	Lunghezza alla massima estensione (configurazione passiva)	Lunghezza alla massima compressione (inclusi i due 2 mm di compensazione vedi pag. 162)	Escursione massima della molla	Massima apertura consentita per evitare il disassemblaggio
M2302-00	M2301-00	EXTRACORTO	31 mm	25 mm	7,5 mm	48 mm*
M2302-01	M2301-01	CORTO	35 mm	28 mm	10 mm	56 mm*
M2302-02	M2301-02	LUNGO	40 mm	33 mm	10 mm	62 mm*



*Distanza tra i 2 occhielli o ganci di ancoraggio

M2301-91 KIT CORRETTORE DI CLASSE II CON GANCIO ANTERIORE

Confezione: 3 correttori con gancio anteriore (1 extracorto, 1 corto, 1 lungo) e 6 misuratori

M2302-91 KIT CORRETTORE DI CLASSE II CON OCCHIELLO ANTERIORE

Confezione: 3 correttori con occhio anteriore (1 extracorto, 1 corto, 1 lungo) e 6 misuratori



Con l'aiuto di questo strumento sarà semplice ed intuitivo capire quale delle tre lunghezze disponibili sia quella corretta.

M3052-00

MINI LIP BUMPER SECONDO PROF. NICOLA VELTRI

Dispositivo disegnato dal Prof. Nicola Veltri appositamente per l'utilizzo su pazienti in dentatura decidua o mista, con mancanza di spazi e/o mandibola di ridotte dimensioni sia sagittalmente che trasversalmente. L'applicazione precoce sui molaretti decidui stimola positivamente lo sviluppo dell'arcata inferiore. Il mini lip bumper è realizzato con una speciale inclinazione dell'arco tale da posizionare lo scudo anteriore nella zona di massima spinta del labbro ed ha uno **stop regolabile a vite** che rende possibile una precisa attivazione senza necessità di piegature del filo. Per regolare lo stop si consiglia l'uso del cacciavite REF P1520-00.

Confezione: 5 pezzi



LIP BUMPER

Costruiti in filo di acciaio inossidabile biomedicale di .045". Protezione labiale in tecnopolimero atossico.


Confezione: 10 pezzi




M3050-00 senza anse

M3051-00 con anse

LIP BUMPER CON ANSE E BAIONETTA DI STOP

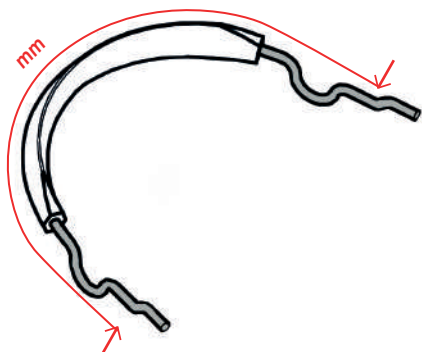


misura	mm	conf.	conf.
1	76	M3051-01	M3051-011
2	80	M3051-02	M3051-012
3	84	M3051-03	M3051-013
4	88	M3051-04	M3051-014
5	92	M3051-05	M3051-015

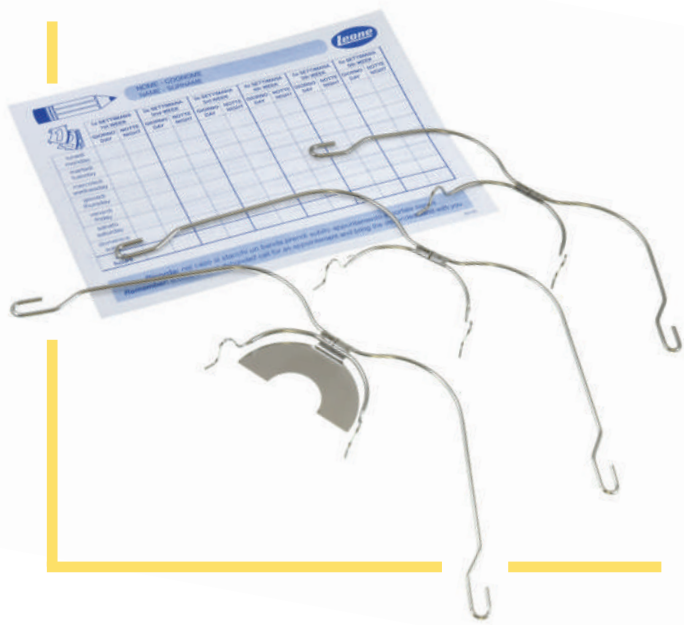

Interamente costruiti in filo elastico di acciaio inossidabile biomedicale: l'arco esterno misura 1,8 mm di diametro mentre l'arco interno è realizzato in un unico pezzo con la porzione terminale di .045" (1,14 mm). La saldatura laser, senza apporto di saldame, che unisce i due archi, rende impossibile la rottura ed evita le allergie dovute al bimetallismo. Linea mediana e numero sono marcati laser. Lucidati a specchio per la massima igiene. Arco esterno disponibile in tre lunghezze. Disponibili standard, con anse preformate, con bite e doppi bite tutti con l'opzione del gancio per elastici.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con trazioni di sicurezza Leone M0810.

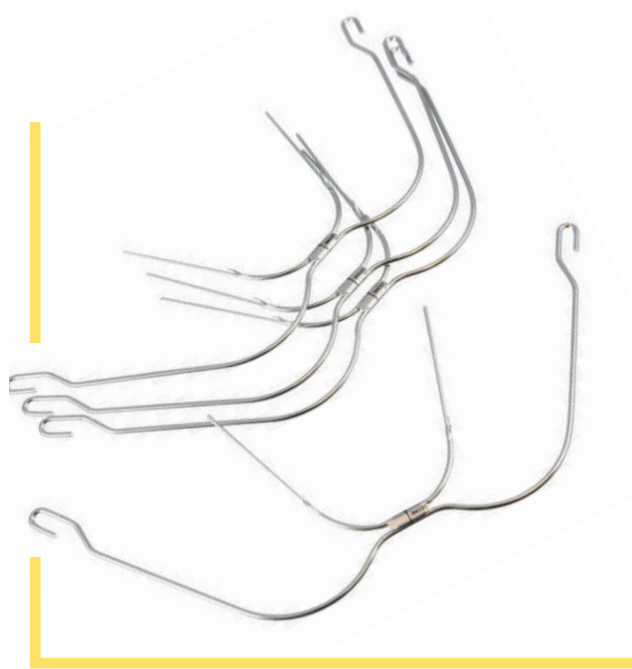


ARCHI EXTRAORALI STANDARD

Grazie alla scelta di realizzare l'arco interno in acciaio inossidabile integrale con la porzione terminale di .045", la realizzazione di anse e/o baionette di stop non ne diminuisce la resistenza strutturale assicurando la trasmissione delle forze extraorali ai tubi presenti sulle bande.

Disponibili in tre lunghezze dell'arco esterno e con l'opzione del gancio per elastici.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con trazioni di sicurezza Leone M0810.

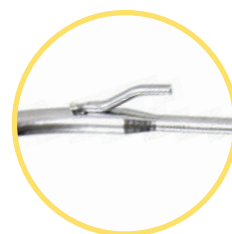


	arco esterno diametro		arco interno diametro	
	mm	mm	inch	

arco standard		
conf.		conf.

arco standard con ganci per elastici		
conf.		conf.

new	arco esterno extralungo	1,80	1,14	.045	M4840-00	M4840-001	1	10		
	arco esterno lungo	1,80	1,14	.045	M4800-00	M4800-001	1	10	M4801-00	M4801-001
	arco esterno corto				M4830-00	M4830-001			M4831-00	M4831-001

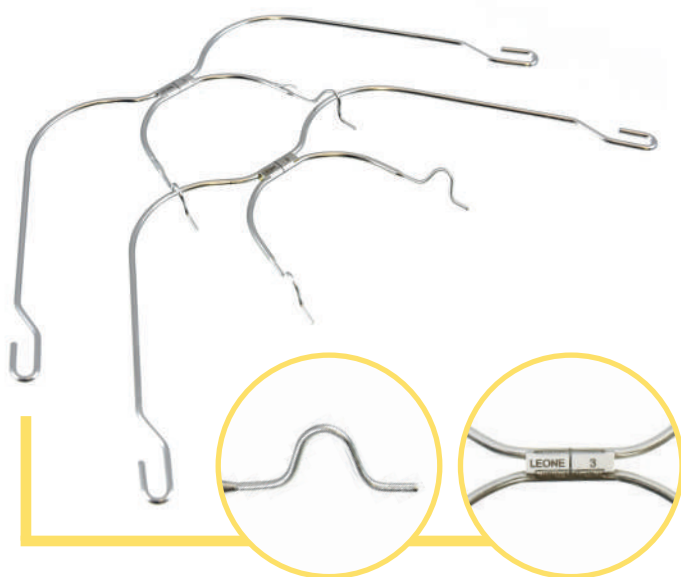

ARCHI EXTRAORALI CON ANSE PREFORMATE

Grazie alla scelta di realizzare l'arco interno in un unico pezzo con la porzione terminale di .045" (1,14mm) le anse preformate risultano facilmente adattabili alle esigenze del paziente ma anche molto resistenti. Disponibili in cinque misure sia con la presenza di ganci per elastici di trazione anteriore che con bite per favorire l'intrusione inferiore.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con trazioni di sicurezza Leone M0810.


linea mediana
marcata

CON ANSE PREFORMATE

d = distanza intermolare in millimetri da ansa ad ansa	misura		arco esterno lungo		arco esterno corto	
			conf.	conf.	conf.	conf.
	83	1	M4805-01	M4805-011	M4835-01	M4835-011
	90	2	M4805-02	M4805-021	M4835-02	M4835-021
	97	3	M4805-03	M4805-031	M4835-03	M4835-031
	104	4	M4805-04	M4805-041	M4835-04	M4835-041
	111	5	M4805-05	M4805-051	M4835-05	M4835-051

CON ANSE PREFORMATE E GANCI PER ELASTICI

d = distanza intermolare in millimetri da ansa ad ansa	misura		arco esterno lungo	conf.
	83	1	M4806-01	1
	90	2	M4806-02	
	97	3	M4806-03	
	104	4	M4806-04	
	111	5	M4806-05	

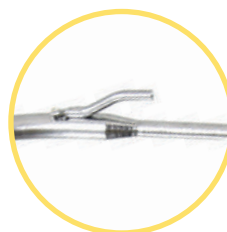

CON ANSE PREFORMATE E BITE


d = distanza intermolare in millimetri da ansa ad ansa	misura		con bite di acciaio inox duro	conf.
	83	1	M4808-01	1
	90	2	M4808-02	
	97	3	M4808-03	
	104	4	M4808-04	
	111	5	M4808-05	



ARCHI EXTRAORALI CON BITE E DOPPIO BITE

Il bite, realizzato in acciaio inox, è assicurato alla porzione anteriore dell'arco grazie ad una saldatura laser. Disponibili, sia nella versione singola che doppia, con bite morbido o duro e con l'opzione con gancio e con gancio e retrattore elastico.

Attenzione: tutti gli archi extraorali devono essere usati con trazioni di sicurezza Leone M0810.

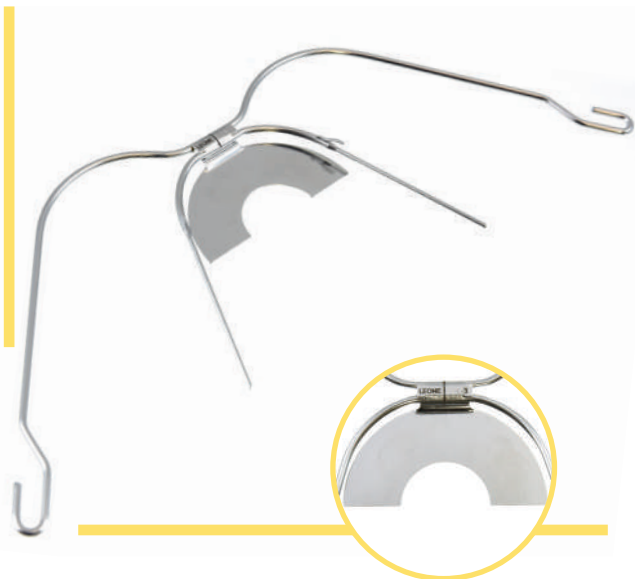


	standard		con ganci per elastici		con ganci e retrattore elastico		
	con bite	con doppio bite	con bite		con bite		conf.
bite di acciaio inox duro	M4808-00	M4824-00	M4809-00		M4807-00		1
bite di acciaio inox morbido	M4808-10	M4824-10	M4809-10		M4807-10		



M3620-01 CUSTODIA PER ARCHI EXTRAORALI CUFFIE E TRAZIONI

Confezione: 10 pezzi

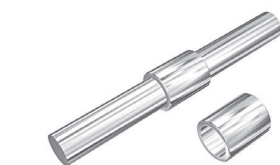

M3307-00 STOP PER ARCHI DA PUNTARE

Costruito in acciaio inossidabile biomedicale. Si usa particolarmente sull'arco intraorale e sui lip bumper. È sufficiente fissarlo con un punto della puntatrice. Adatto per filo diametro 1,14 mm (.045").
Confezione: 10 pezzi



M3309-00 STOP PER ARCHI DA AVVITARE

Di acciaio inossidabile. Adatto per filo diametro 1,14 mm (.045").
Confezione: 10 pezzi

M3309-95 KIT STOP PER ARCHI DA AVVITARE

Confezione: 50 stop ed 1 cacciavite



MASCHERA FACCIALE

Indicata nel trattamento delle retrusioni mascellari, dei prognatismi mandibolari e delle schisi palatali. Il cambiamento dei rapporti fra mascella e mandibola facilita il successivo trattamento ortodontico. Interamente costruita in acciaio inossidabile e resina atossica, può essere aggiustata dimensionalmente per adattarla alle singole necessità con regolazione verticale o orizzontale. Tutti i bloccaggi sono realizzati con viti a brugola.

La maschera con appoggi zigomatici ha la fascia regolabile grazie agli inserti di velcro.

Confezioni da 1 pezzo: 1 maschera, 1 chiavetta di regolazione e istruzioni d'uso in custodia da consegnare al paziente

RICAMBI	Modello	Per	Confezione
	M0777-00	Per mento	Confezione: 1 pezzo
	M0778-00	Per frontale	Confezione: 1 pezzo
	M0779-00	Per zigomi	Confezione: 2 pezzi



	BEIGE	ROSSO	GIALLO	VERDE	
CON REGOLAZIONE ORIZZONTALE	M0774-00	M0774-00R	M0774-00G	M0774-00V	PICCOLA
	M0776-00	M0776-00R	M0776-00G	M0776-00V	GRANDE
	M0773-00				MINI



	BEIGE	ROSSO	GIALLO	VERDE
UNIVERSALE REGOLABILE	M0775-00	M0775-00R	M0775-00G	M0775-00V



	BEIGE	
CON REGOLAZIONE VERTICALE	M0774-01	PICCOLA
	M0776-01	GRANDE



	BEIGE
CON APPOGGI ZIGOMATICI	M0771-00



MASCHERA FACCIALE DINAMICA

	BLU	ROSSO
CON REGOLAZIONE VERTICALE	M0772-01	M0772-01R

Confezione da 1 pezzo:

- 1 maschera,
- 1 chiavetta di regolazione,
- 2 cuscinetti per la fronte,
- 2 cuscinetti per il mento e istruzioni d'uso

ELASTICI CONSIGLIATI

		diametro interno	
		3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm
forti	8 oz - 224 gr	K0935-08	K0936-08



M0790-00
CUFFIA CON MENTONIERA

Per correggere le malocclusioni di Classe III con prognatismo mandibolare. La cuffia e le trazioni elastiche sono completamente regolabili; la mentoniera di pelle naturale è conformata per adattarsi a tutte le tipologie facciali. Colore blu.

Confezione: 1 pezzo

RICAMBI

M0791-00 Mento
Confezione: 1 pezzo

M0791-01 Elastici
Confezione: 2 pezzi



CUFFIA PER TRAZIONI DI SICUREZZA

Per trazione alta. Si usa esclusivamente con le apposite trazioni di sicurezza. Su di essa si inserisce il gancio di sicurezza al quale si aggancia il modulo. Prodotta in materiale ipoallergico, è lavabile e presenta un'imbottitura che la rende molto confortevole. Disponibile in tre taglie e in due colori per la motivazione psicologica del paziente.

Confezione: 1 pezzo

blu	
piccola	M0805-00
media	M0805-10
grande	M0805-20

rosa	
piccola	M0805-00S
media	M0805-10S
grande	M0805-20S



FASCIA PER TRAZIONI DI SICUREZZA

Per trazione bassa. Identica alla cuffia sia nell'uso con le trazioni di sicurezza che nelle caratteristiche del materiale. Disponibile in due colori per la motivazione psicologica del paziente.

Confezione: 10 pezzi

M0800-00S Rosa

M0800-00 Blu

M3613-01
CUSTODIA
PER MASCHERA FACCIALE

Per consegnare al paziente la maschera facciale. Trasparente, lavabile, completamente neutra.

Confezione: 10 pezzi



TRAZIONI DI SICUREZZA

Si usano esclusivamente con le apposite cuffie o fasce. La sicurezza del loro impiego è data dal gancio che libera la molla se la forza di trazione supera i 2 Kg ca. per parte. Questo sistema elimina il pericolo causato dalla fuoriuscita dell'arco extra-orale dai tubi con conseguente violento ritorno elastico in bocca. Le molle a spirale presenti all'interno del modulo permettono il rilascio di forze costanti nel tempo. Disponibili in tre gradazioni di forza facilmente riconoscibili dal diverso colore della striscia d'aggancio forata.

Confezione: 10 pezzi

	colore	
leggere	trasparente	M0810-01
medie	giallo	M0810-02
pesanti	blu	M0810-03



sistema di controllo a molla

della quantità di forza rilasciata dalla trazione

molle di acciaio inossidabile

assicurano il rilascio di forze costanti nel tempo

sicurezza totale per il paziente



il gancio libera il modulo a molla se la forza di trazione supera i 2 chili circa per parte

fori numerati

per il controllo terapeutico

colore differenziato delle strisce forate

per indicare le diverse forze di trazione dei moduli

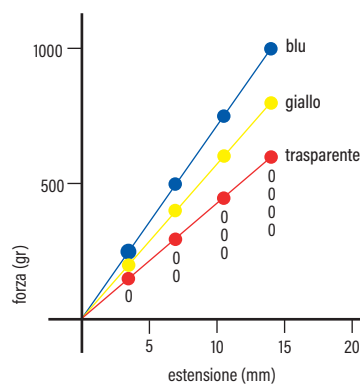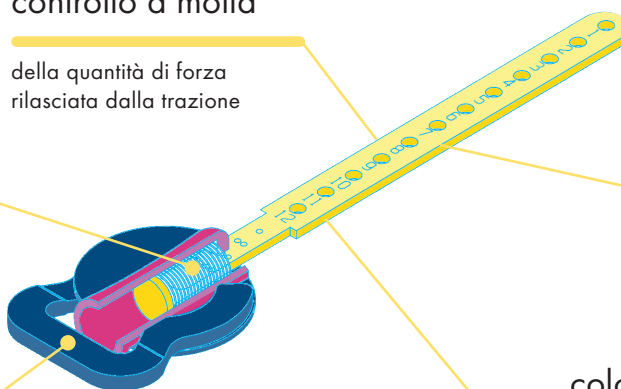

La quantità di forza rilasciata dalla trazione è controllabile: quando sulla striscia in trazione si vedono per esempio due punti significa che il modulo rilascia 2/4 della forza esprimibile dalla molla.

Il grafico indica le forze rilasciate dai tre tipi di trazione.