



Come importare librerie
Leone_XCN su **Dental Wings**[®]

1. Aprire l'applicazione DW Client

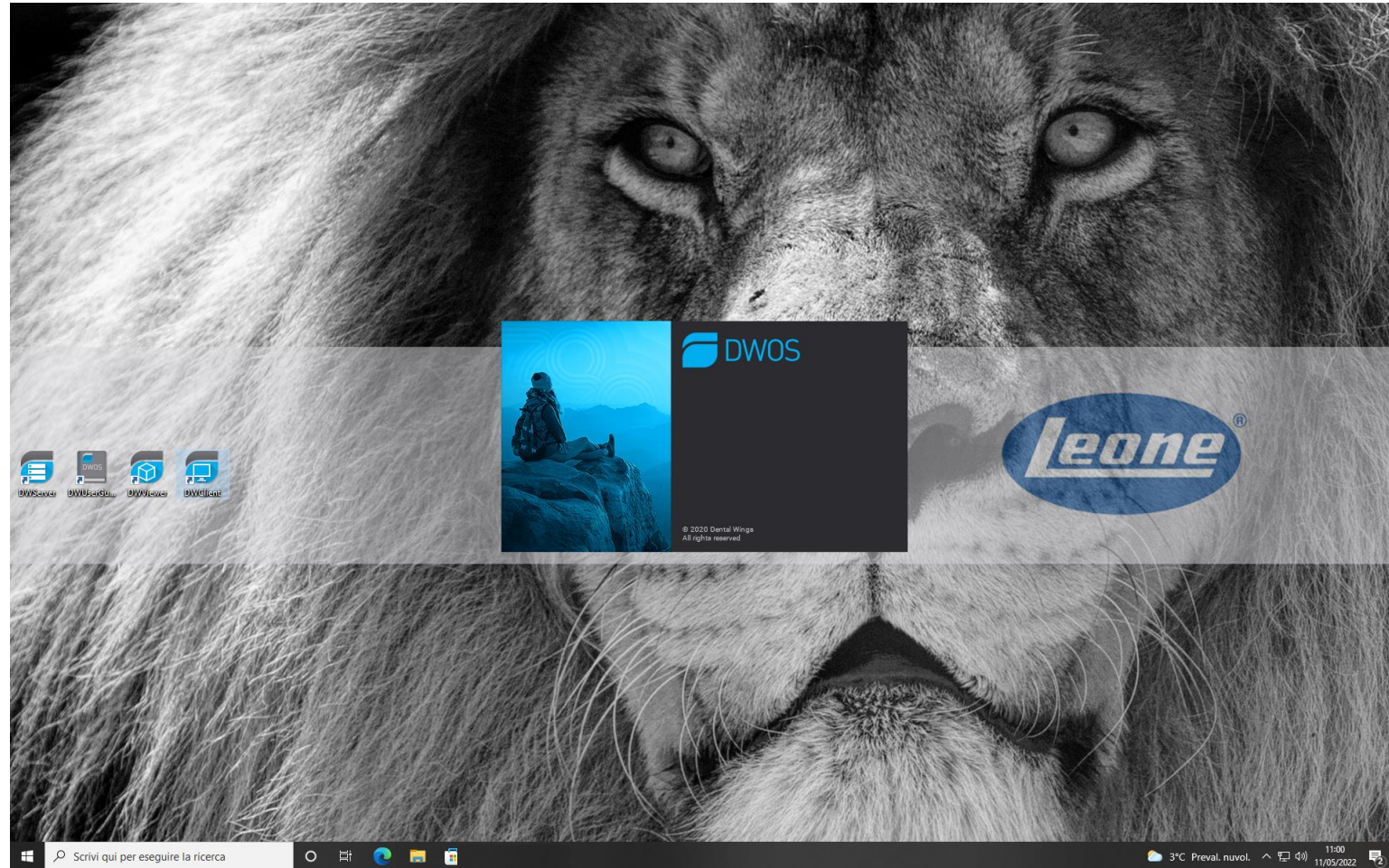


Come importare librerie
Leone_XCN su DWOS®


2. Selezionare «Applicazioni»

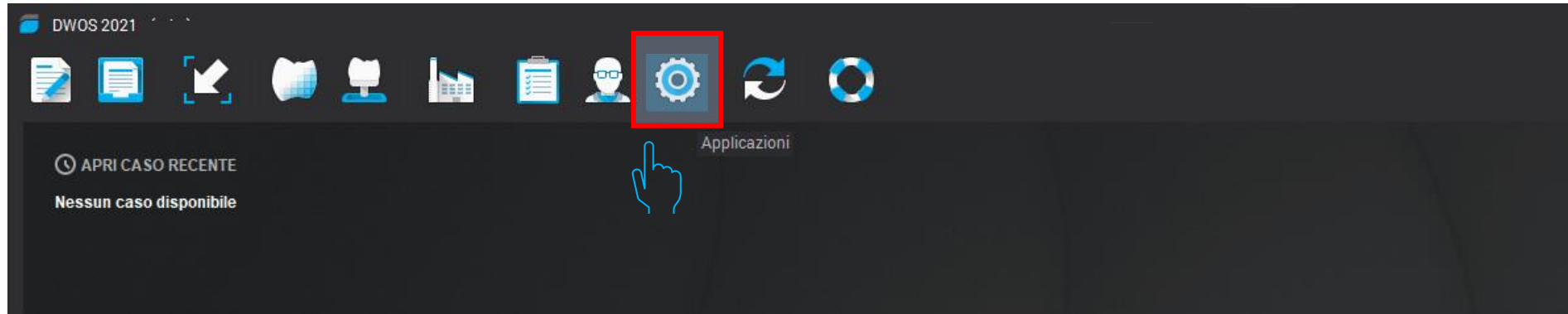


3. Selezionare «Kit Impianti»

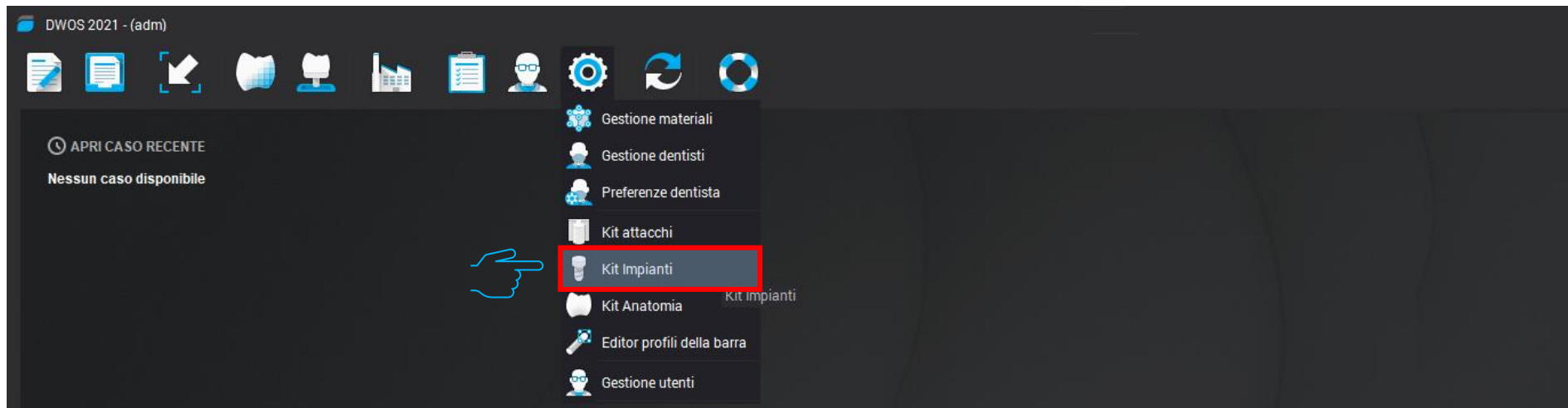


4. Nel menù a tendina del Kit Impianti selezionare «Importare Kit produttore impianti»

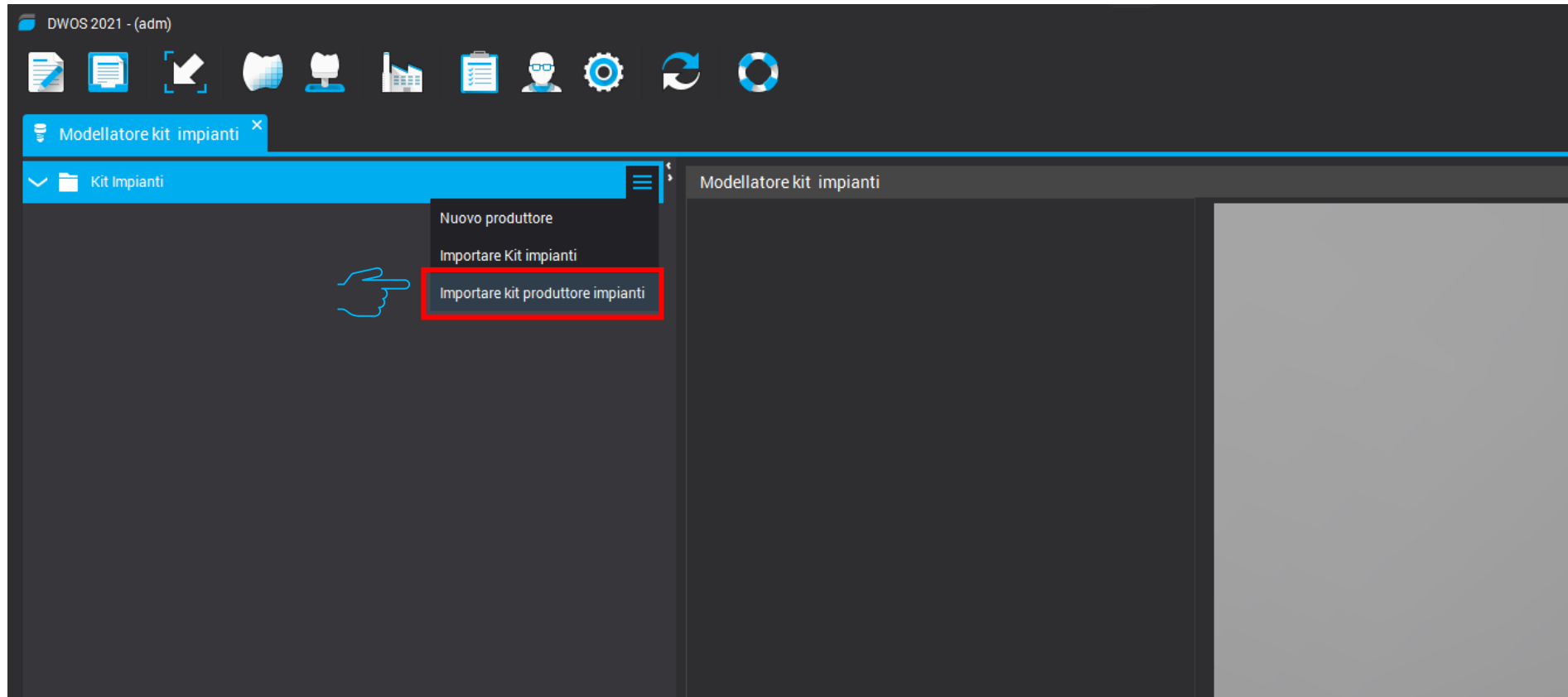

5. Selezionare la cartella zippata «**Leone-XCN-AAAA.zip**»
Che può essere scaricata direttamente dal sito Leone
<https://www.leone.it/implantologia/>

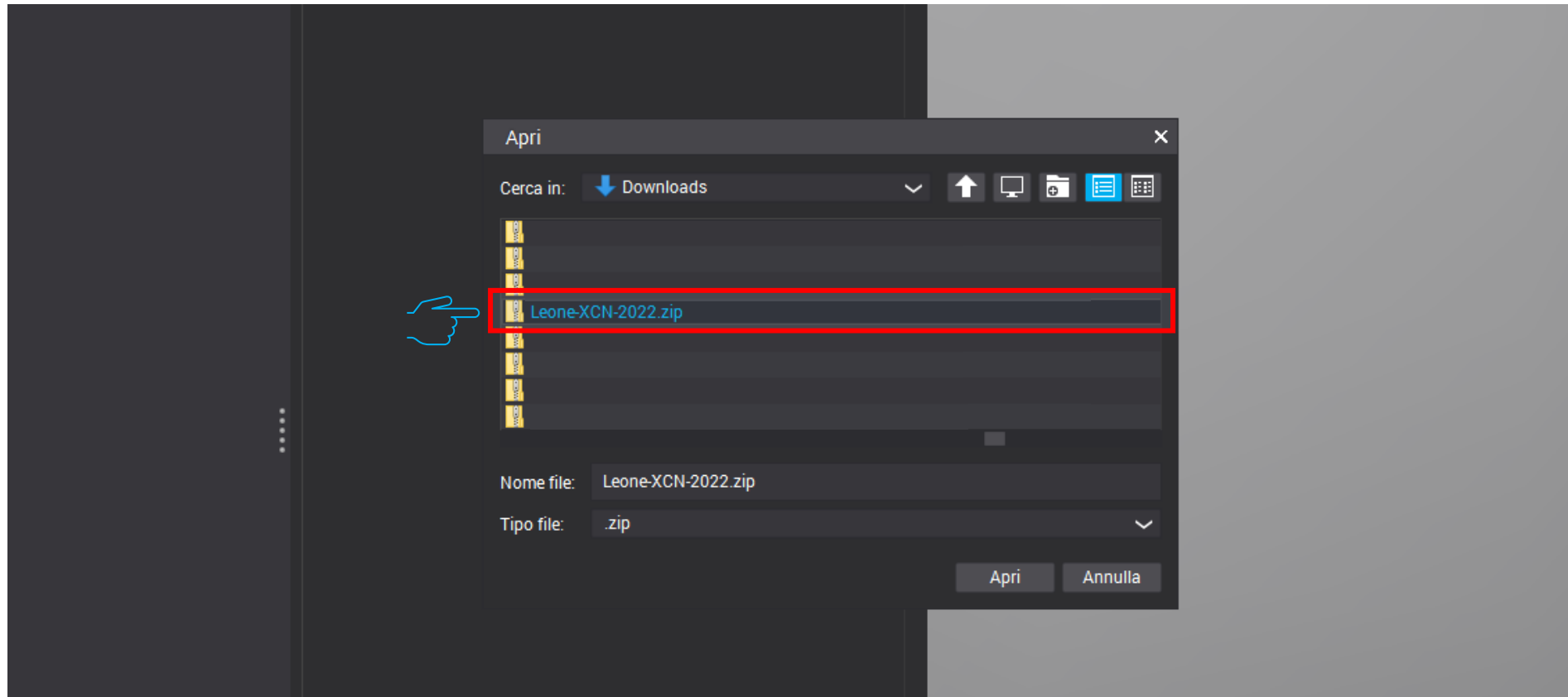

5. Le librerie Leone al termine della procedura sono attive nel software

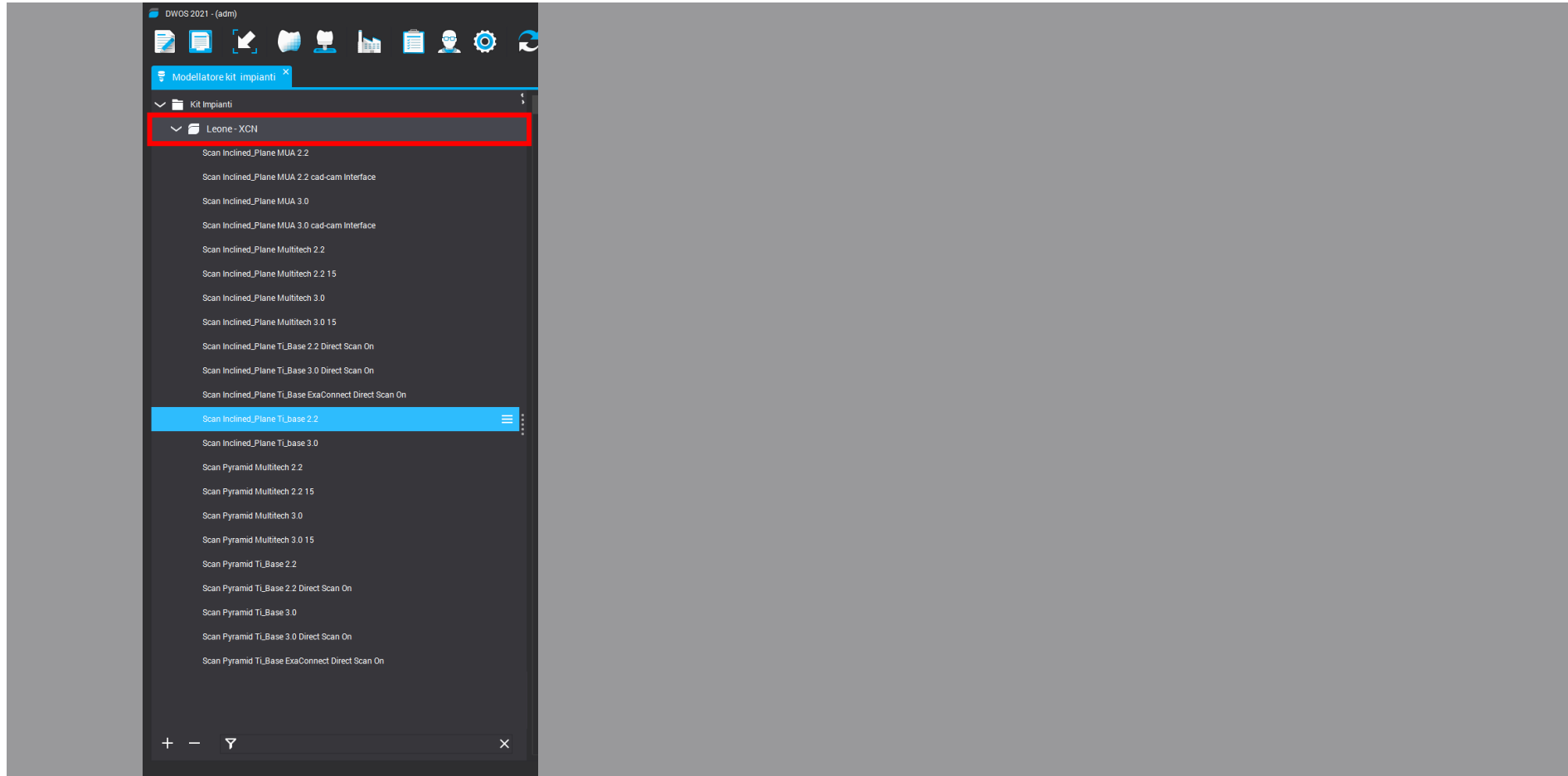

Come importare librerie
Leone_XCN su DWOS®