


ExaConnect

**XCN<sup>®</sup>**

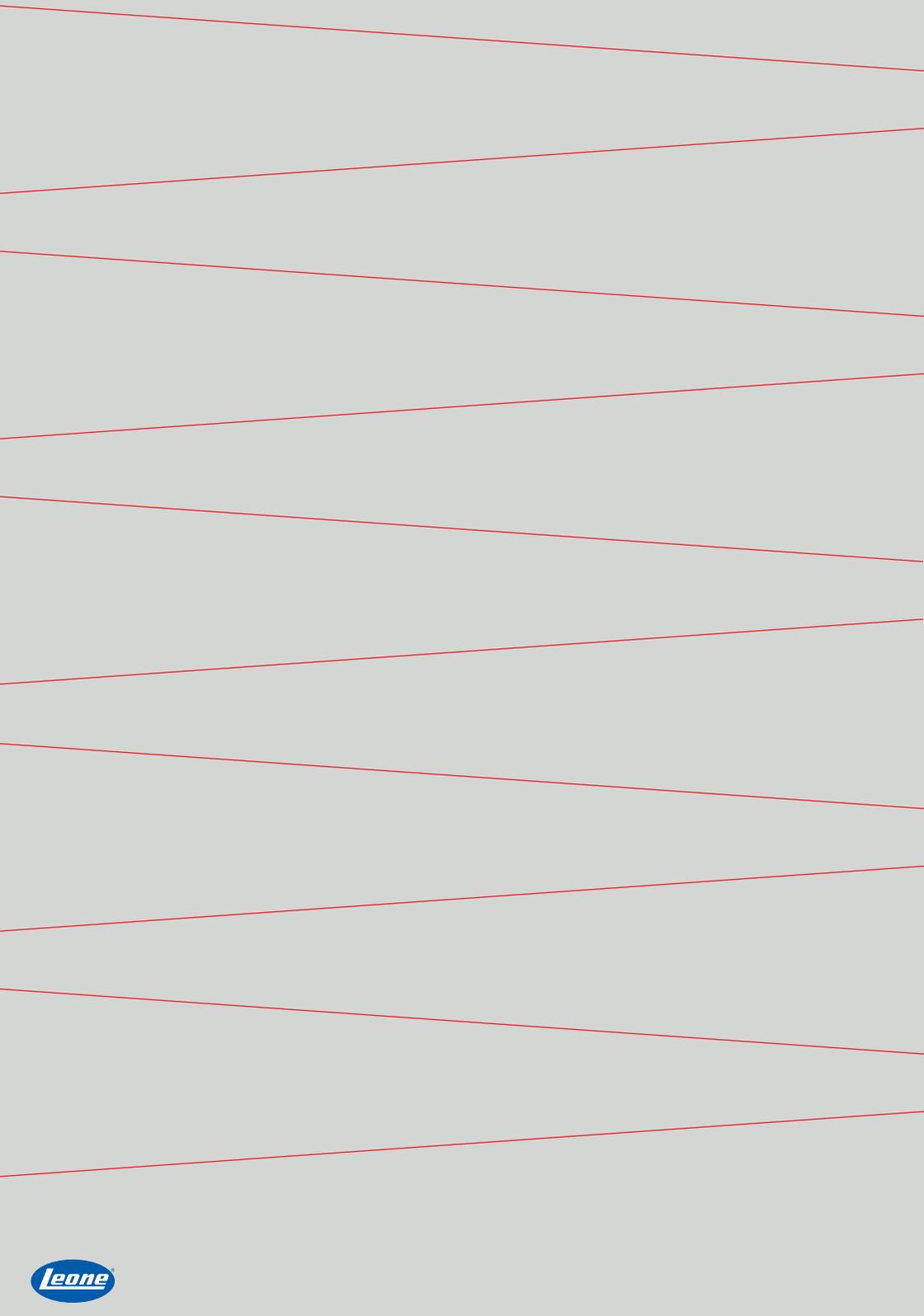




ExaConnect  
para prótesis atornillada  
individual

# ExaConnect

Solución innovadora para prótesis individual atornillada sin cemento

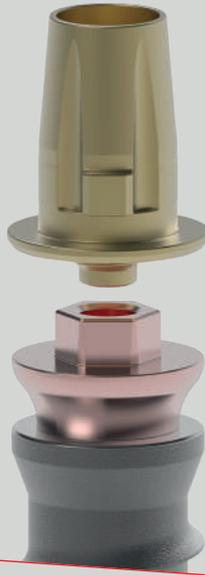

## VENTAJAS

Ideal para un flujo de trabajo digital: el único pilar Ti-Base del mercado con varios ángulos y alturas gingivales

En la versión Plus, acondicionamiento inclinado de los tejidos blandos, con resultados estéticos mejorados

Desplazamiento de la plataforma protésica desde el nivel óseo hasta el nivel tisular, con la sencillez operativa y la estabilidad absoluta que proporciona la conexión como Morse

# Protocolo One Abutment-One Time

Mantenimiento de los tejidos blandos durante el proceso de cicatrización y protésico




## CUANDO

- Diente único atornillado
- Tramo transmucoso profundo
- Curación transgingival (con tornillo especial de cicatrización)
- Carga inmediata


# Características

## Unica piattaforma protesica

Emergencia con hexágono externo  
Perfect Fit que limita la posibilidad  
de destornillar

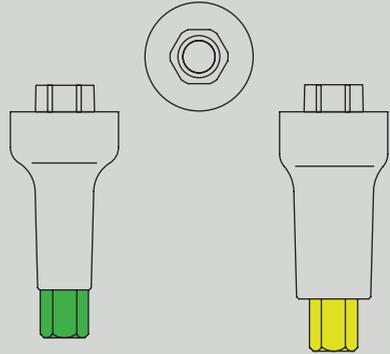


Amplia gama de ángulos  
(0°, 7,5°, 15°, 25°) y alturas gingivales,  
anodizado rosa para mejorar la estética

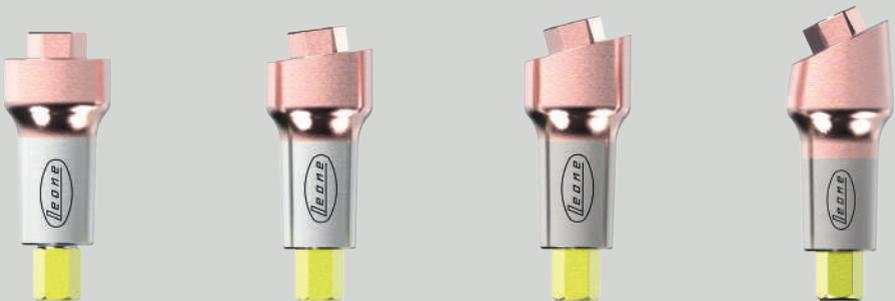


Orientación libre del canal de acceso al tornillo gracias a la conexión XCN® 360°



Ideal para un flujo de trabajo totalmente digital, se convierte en una Ti-Base con varios ángulos y alturas gingivales

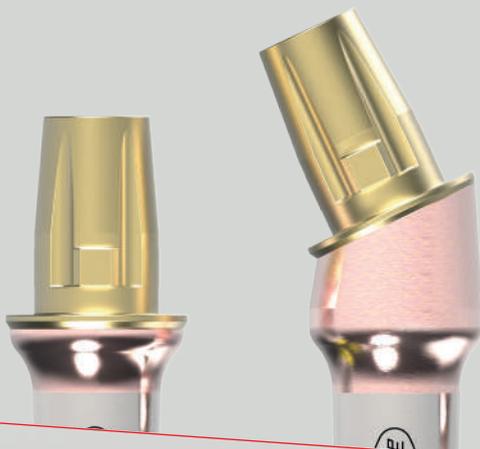

Se suministra con un tornillo polifuncional premontado para facilitar su colocación

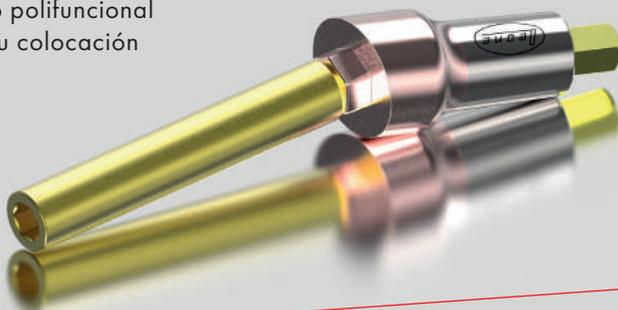

# Accesorios ExaConnect

El sistema ofrece componentes para flujos de trabajos tanto tradicionales como digitales.



Tornillo de cicatrización

Transfer para Reposicionamiento y Pick-up



Ti-Base de laboratorio/escaneo



Analogo ExaConnect



Pilar provisional


Calcinable para Ti-Base



Pilar Ti-Base

# ExaConnect PLUS

Línea protésica disponible en versión estéril para optimizar el flujo de trabajo  
One Abutment-One Time.

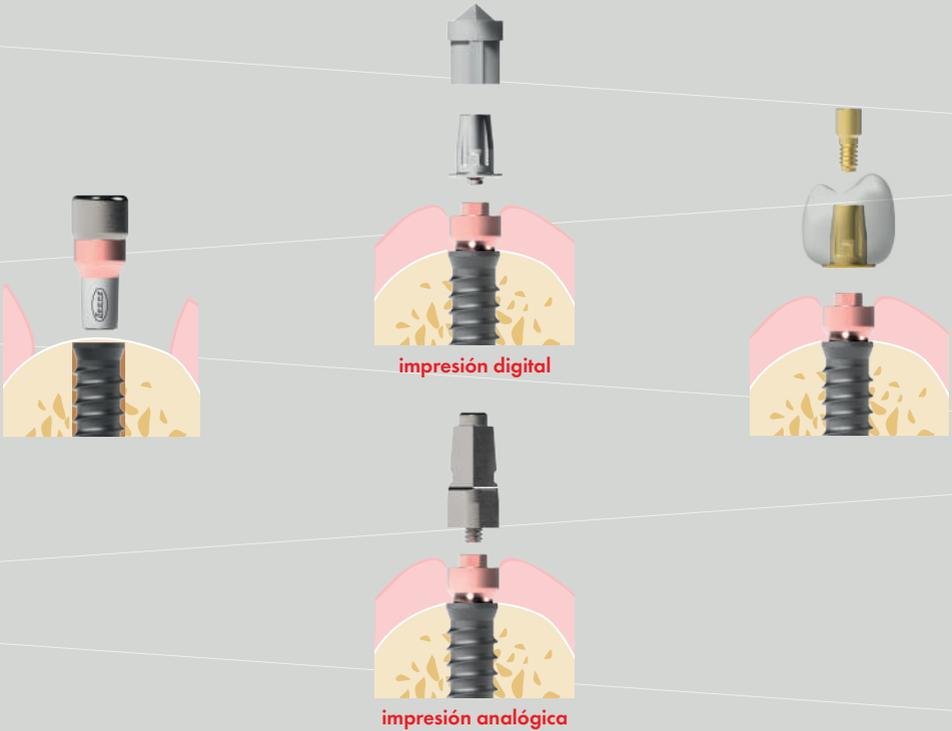

- Diseñado para ser insertado inmediatamente después de la colocación del implante
- Excelente estética natural gracias al acondicionamiento de los tejidos blandos con la inclinación del conector elegida
- Implante XCN® más ExaConnect, el equivalente a un implante transmucoso pero con más ángulos y alturas gingivales

# Reporte de caso



Cortesía del Dr. Nazario Russo y Tpd. Gerardo Senatore



Cortesía del Dr. Luigi Lucchiarì  
y del Laboratorio Dental L.O.R.I.



CONSULTE LA BIBLIOGRAFÍA  
COMPLETA EN LA PÁGINA WEB:

[WWW.LEONE.IT](http://WWW.LEONE.IT)



**XCN<sup>®</sup>**

**SOLO SONRISAS REALES**



**Leone S.p.a.**

Via P. a Quaracchi 50

50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

**Export Dept.:**

Phone: +39.055.3044620 | Fax: +39.055.304405  
export@leone.it | www.leone.it