


SISTEMA IMPLANTARE

XCN[®]

MONCONI MUA
PER PROTESI AVVITATA
MULTIPLA
E ACCESSORI

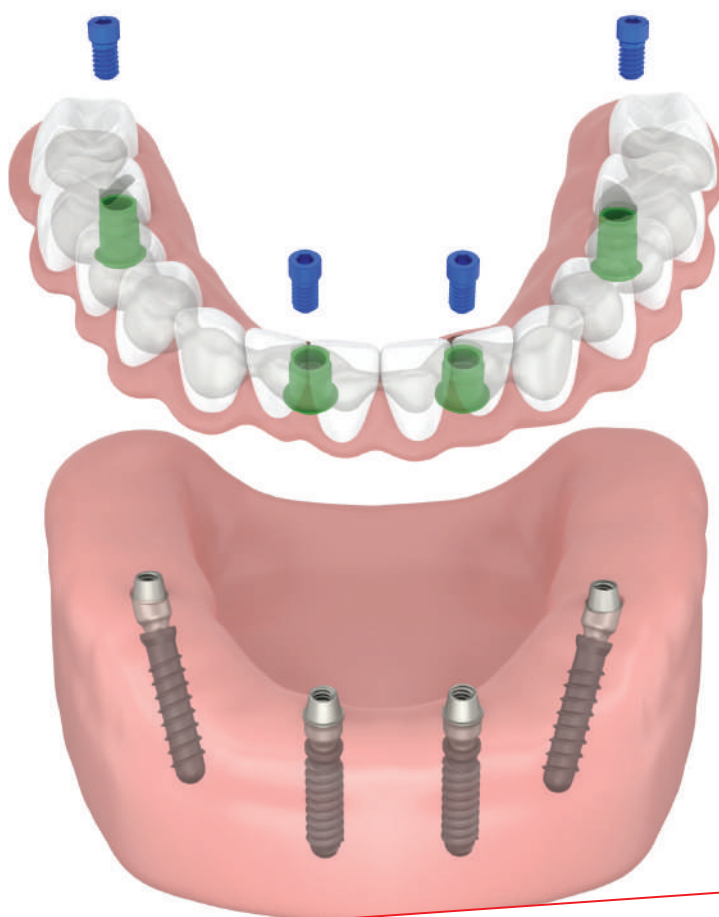

MONCONI MUA (Multi-Unit Abutment)

Ideali in caso di

- edentulie parziali (ponti)
- edentulie totali
(Toronto Bridge e Overdenture su barra)
- carico immediato (All-on-Four)
- guarigione transgengivale
(con apposita vite di guarigione)



Caratteristiche

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- emergenza tronco-conica per il recupero del disparallelismo
- **moncone MUA:** autoclavabile
fornito montato su vite polifunzionale per facilitare il suo posizionamento e orientamento
- **moncone MUA Plus:** sterile
fornito montato su posizionatore per facilitare il suo posizionamento e orientamento

Ampiezza della gamma

La gamma di monconi MUA Leone è la più ampia presente sul mercato con angolazioni a 0°, 7,5°, 15°, 25° e 35° in varie altezze transmucose.

Tutta la gamma è disponibile anche per impianti di piccolo diametro.

Versatilità protesica

Il moncone MUA dispone di una serie di accessori specifici per le varie tecniche di realizzazione di strutture avvitate:




- **interfacce CAD-CAM** presenti nei più diffusi software come 3Shape Dental System, Exocad DentalCAD, DWOS Dental Wings ed EGS Dental Cad* per realizzare mediante produzione digitale barre e ponti avvitati;
- **cilindri in titanio**, con scanalature di ritenzione e due facce piane contrapposte antirotazionali, per tecniche di incollaggio;
- **cilindri in titanio con spessore maggiorato**, con superficie liscia e specifici fili in titanio ideali per tecniche di saldatura;
- **cilindri calcinabili standard e alti** per tecniche di fusione.

*3Shape Dental System è un marchio registrato 3Shape, Exocad è un marchio registrato Exocad GmbH, DWOS e Dental Wings sono marchi registrati Dental Wings, EGS Dental Cad è un marchio registrato EGS s.r.l.

Facile recupero del disparallelismo

Ideali per il recupero di ogni genere di disparallelismo, fino ad un massimo di 50°, grazie alle varie angolazioni e all'emergenza tronco-conica.

La connessione XCN® 360° permette il libero orientamento del canale di accesso alla vite, adattandosi a qualsiasi situazione clinica. Il fissaggio dell'esagono 360° nella posizione prescelta guida il clinico nel posizionamento in bocca con la massima precisione.

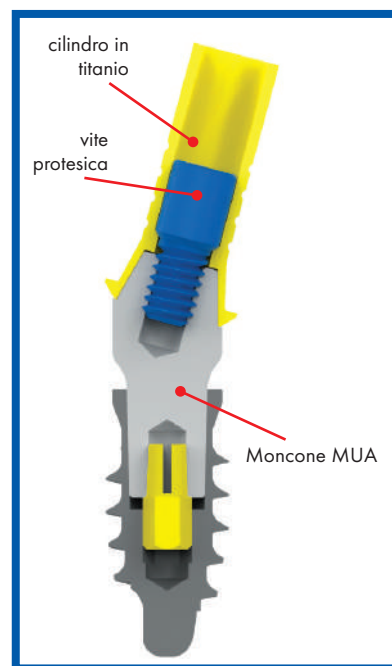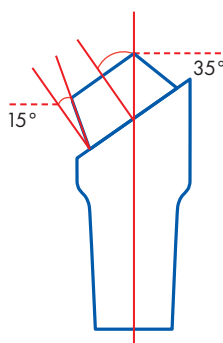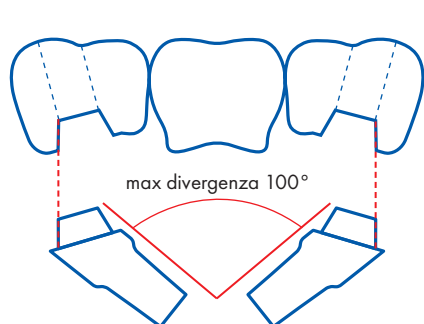

Rapidità e sicurezza procedurale


Con il sistema Leone si gestisce solamente una vite dato che la connessione tra impianto e moncone MUA è realizzata con un cono Morse autobloccante. Tale caratteristica aumenta la rapidità delle procedure, particolarmente importante in caso di carico immediato.

La vite protesica è estremamente robusta con un diametro di 2 mm (M2).

MONCONI MUA **PLUS** - sterili

I monconi MUA Plus sono progettati per essere inseriti subito dopo il posizionamento dell'impianto. Sono premontati su un posizionatore che agevola il loro posizionamento e orientamento negli impianti. I monconi sono privi di esagono e si possono quindi ruotare di 360°. L'immediata ritenzione offerta dal cono Morse evita un involontario spostamento del moncone prima del suo fissaggio definitivo nell'impianto.

Il sistema offre accessori appositamente studiati per passivare le strutture nelle procedure di carico immediato come ad esempio cilindri in titanio e apposite viti polifunzionali ideali per tecniche di incollaggio intraorale o cilindri in titanio con spessore maggiorato e fili in titanio per tecniche di saldatura intraorale.

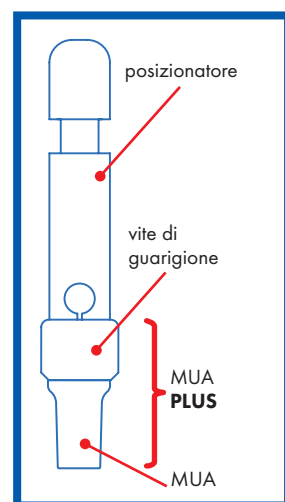

MONCONI MUA



Strumenti necessari




- scelta del moncone MUA più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in PEEK

Confezione

- 1 moncone montato su vite polifunzionale
- 1 esagono (escluso i diritti)



Moncone MUA

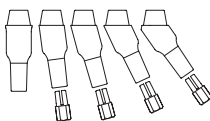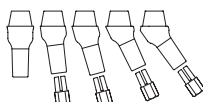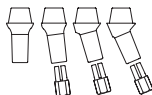

1:1

Ø connessione (mm)
Ø piattaforma
protesica (mm)
GH (mm)

2,2

2,2

2,2

2,2

3,3

3,3

3,3

3,3



1,5

3




5

7

	diritti	126-3311-01	126-3313-01	126-3315-01	126-3317-01
	angolati 7,5°	126-3311-07	126-3313-07	126-3315-07	
REF	angolati 15°	126-3311-15	126-3313-15	126-3315-15	
	angolati 25°	126-3311-25	126-3313-25	126-3315-25	
	angolati 35°		126-3313-35	126-3315-35	

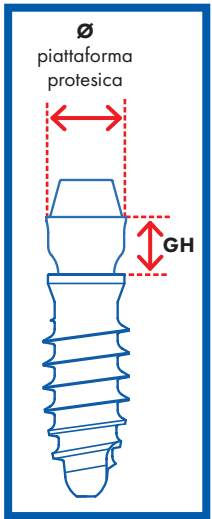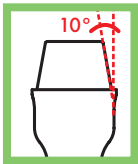

Moncone MUA

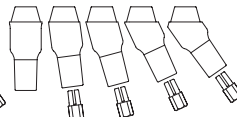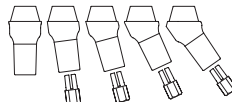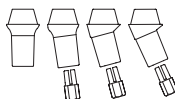

1:1

Ø connessione (mm)
Ø piattaforma
protesica (mm)
GH (mm)

3,0

3,0

3,0

3,0

4,1

4,1

4,1

4,1


1,5

3

5

7

	diritti	126-4111-01	126-4113-01	126-4115-01	126-4117-01
	angolati 7,5°	126-4111-07	126-4113-07	126-4115-07	
REF	angolati 15°	126-4111-15	126-4113-15	126-4115-15	
	angolati 25°	126-4111-25	126-4113-25	126-4115-25	
	angolati 35°		126-4113-35	126-4115-35	

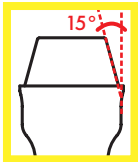

MONCONI MUA PLUS




Strumenti necessari

- scelta del moncone MUA Plus più idoneo con gli Abutment Gauge
- attivazione della connessione con il percussore con punta diritta o curva in titanio

Confezione sterile

- 1 moncone con vite di guarigione montato su posizionatore

Moncone MUA Plus

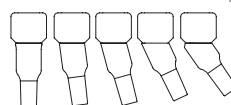

Ø connessione (mm)

2,2

2,2

2,2

Ø piattaforma
protesica (mm)

3,3

3,3

3,3

GH (mm)

1,5

3

5

diritti

126-3321-01

126-3323-01

126-3325-01

angolati 7,5°

126-3321-07

126-3323-07

126-3325-07

REF angolati 15°

126-3321-15

126-3323-15

126-3325-15

angolati 25°

126-3321-25

126-3323-25



126-3325-25

angolati 35°

126-3323-35

126-3325-35

Moncone MUA Plus

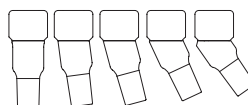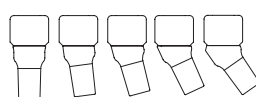

Ø connessione (mm)

3,0

3,0

3,0

Ø piattaforma
protesica (mm)

4,1

4,1

4,1

GH (mm)

1,5

3

5

diritti

126-4121-01

126-4123-01

126-4125-01

angolati 7,5°

126-4121-07

126-4123-07

126-4125-07

REF angolati 15°

126-4121-15

126-4123-15

126-4125-15

angolati 25°

126-4121-25



126-4123-25

126-4125-25

angolati 35°

126-4123-35

126-4125-35

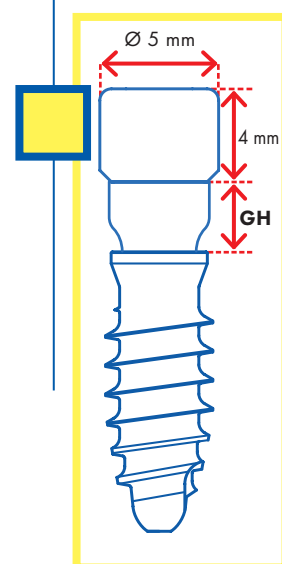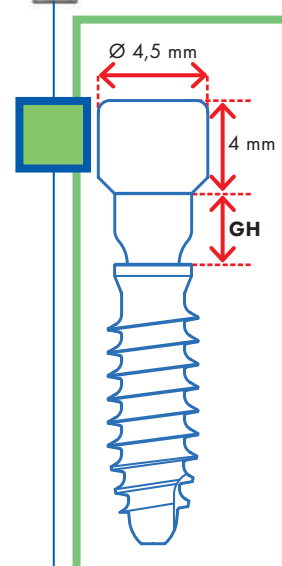


VITI DI GUARIGIONE PER MONCONI MUA

- fabbricate in titanio grado medicale 5
- per condizionare i tessuti molli con il moncone MUA
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

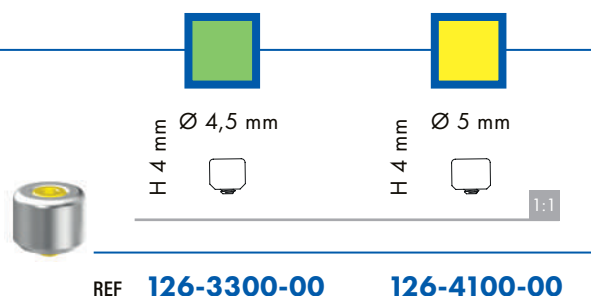


VITI DI GUARIGIONE SLIM PER MONCONI MUA

- fabbricate in titanio grado medicale 5
- per condizionare i tessuti molli con il moncone MUA
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:


raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

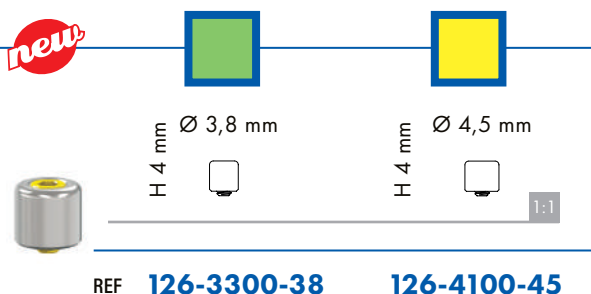

TRANSFER DA RIPOSIZIONAMENTO PER MONCONI MUA

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione del moncone MUA fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaio chiuso
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

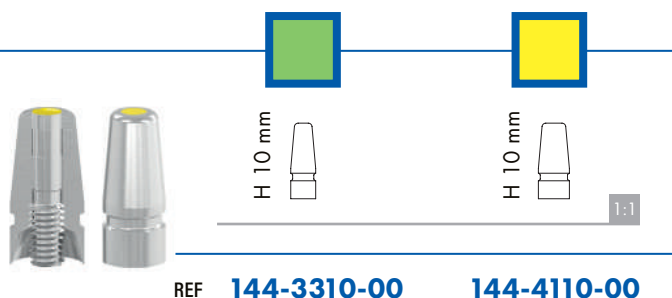

TRANSFER PICK-UP PER MONCONI MUA

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per rilevare la posizione del moncone MUA fissato all'impianto
- per tecnica a cucchiaio aperto
- con codice colore
- autoclavabili


Confezione:

1 transfer Pick-Up

1 vite Pick-Up

Strumenti necessari:



raccordo per viti con l'avvitatore manuale protesico

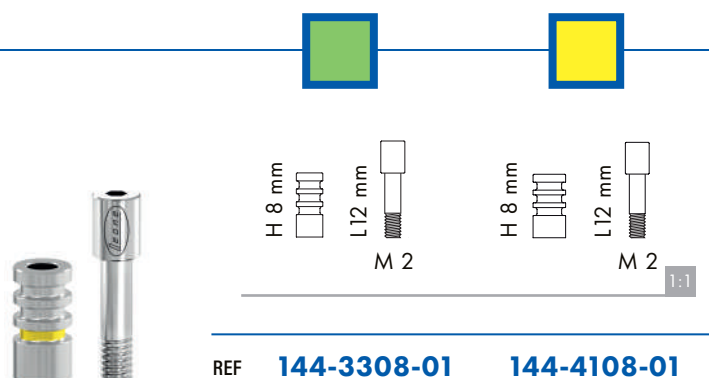

ANALOGHI-MONCONE MUA

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per replicare nel modello in gesso la posizione del moncone MUA fissato all'impianto
- con codice colore

Confezione: 1 pezzo

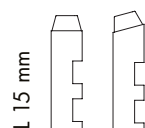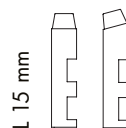

1:1

REF	diritti	146-3315-00	146-4115-00
	angolati	146-3315-15	146-4115-15

SCAN BODY* PER MONCONI MUA

- fabbricato in PEEK
- per rilevare la posizione del moncone MUA attraverso la presa di impronta ottica intraorale o la digitalizzazione del modello in laboratorio
- autoclavabile

Confezione: 5 pezzi




REF **141-0026-35**

POSIZIONATORE PER SCAN BODY PER MONCONI MUA

- fabbricato in acciaio inossidabile
- per posizionare, avvitare e svitare lo Scan Body sui monconi MUA
- con foro per l'inserimento di un filo di sicurezza
- autoclavabile

Confezione: 1 pezzo

new

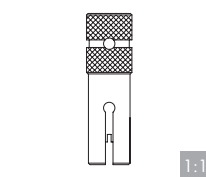

REF **141-0001-35**

ANALOGHI DIGITALI* PER MONCONI MUA

- fabbricati in acciaio inossidabile
- per essere inseriti all'interno di un modello prototipato originato da un'impronta ottica intraorale del moncone MUA
- con codice colore

Confezione:

- 1 analogo
- 1 vite polifunzionale per il posizionamento nel modello
- 2 pin per la stabilizzazione nel modello



1:1

REF **142-2210-54** **142-3010-54**




*Sul sito Leone sono scaricabili le librerie dei software CAD-CAM in cui il sistema Leone è presente: www.leone.it/implantologia.

INTERFACCE CAD-CAM* PER MONCONI MUA

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- per fissare la protesi realizzata con CAD-CAM ai monconi MUA in caso di tecniche di incollaggio (es. strutture in zirconia, PEEK, ecc.)
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione:

- 2 interfacce CAD-CAM
- 2 viti di connessione a testa bassa anodizzate blu

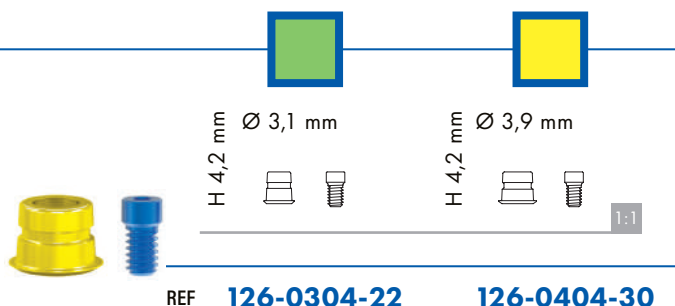


CILINDRI DA INCOLLAGGIO PER MONCONI MUA

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- per fissare la protesi ai monconi MUA
- forniti con calcinabile cilindrico per tecniche di incollaggio
- spessore parete 0,4 mm
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione:

- 2 cilindri
- 2 calcinabili per cilindri da incollaggio
- 2 viti di connessione a testa bassa anodizzate blu
- 2 viti di connessione a testa alta anodizzate blu

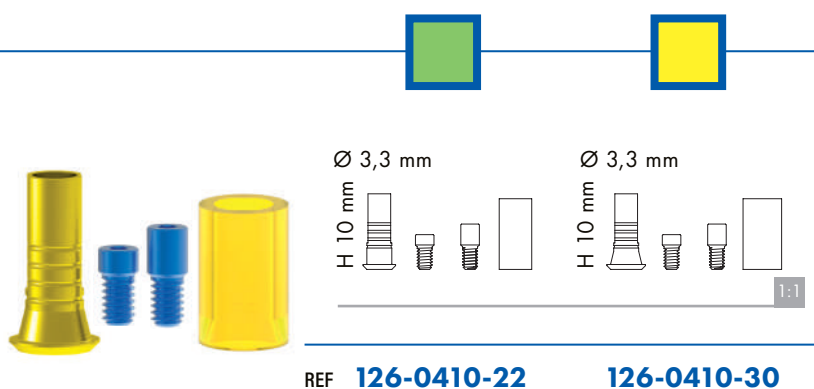


CILINDRI CALCINABILI STANDARD PER MONCONI MUA

- fabbricati in materiale plastico calcinabile
- con codice colore

Confezione:

- 4 cilindri
- 4 viti di connessione a testa bassa anodizzate blu

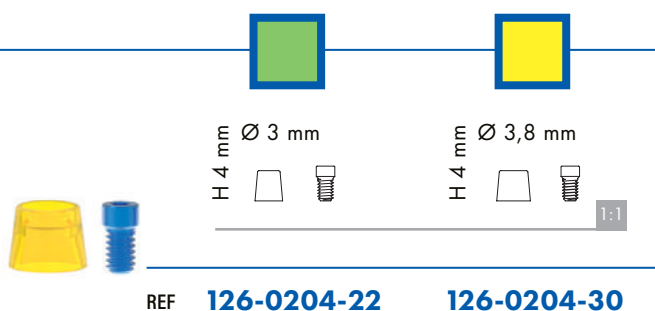


CILINDRI CALCINABILI ALTI PER MONCONI MUA

- fabbricati in materiale plastico calcinabile
- con codice colore

Confezione:

- 4 cilindri
- 4 viti di connessione a testa alta anodizzate blu

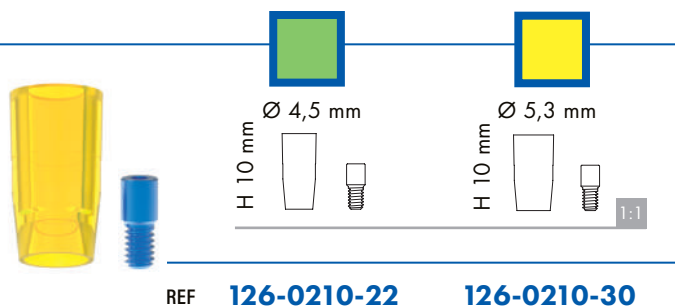


CILINDRI DA SALDATURA PER MONCONI MUA

- fabbricati in titanio grado medicale 5
- per fissare la protesi ai monconi MUA
- spessore parete 0,8 mm
- con codice colore
- autoclavabili

Confezione:


- 2 cilindri
- 2 viti di connessione a testa bassa anodizzate blu
- 2 viti di connessione a testa alta anodizzate blu

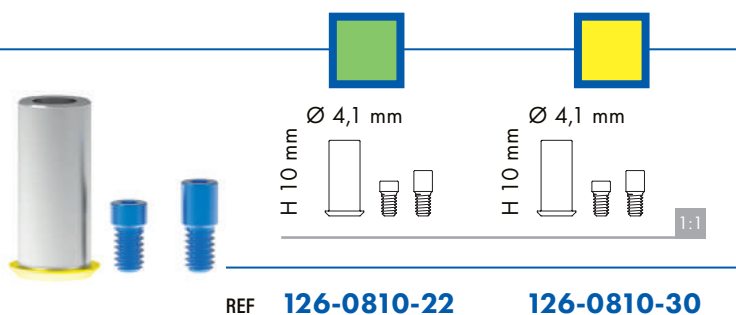

FILI IN TITANIO PER SALDATURA

- fabbricati in titanio grado medicale 2
- per tecniche di saldatura intra o extra-orale
- Ø 1,5 mm: per distanze tra monconi ≤ 8 mm
- Ø 2 mm: per distanze tra monconi > 8 mm
- autoclavabili


Confezione: 5 pezzi

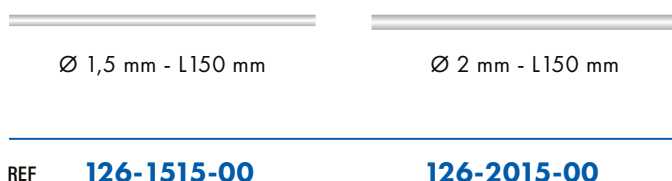

VITE POLIFUNZIONALE

- fabbricata in titanio grado medicale 5
- per posizionare i monconi MUA negli impianti
- per facilitare l'orientamento e la parallelizzazione dei monconi
- per chiudere il canale dei cilindri in titanio durante il fissaggio della protesi
- per realizzare un canale di dimensioni adeguate per la vite di connessione durante la modellazione della struttura in laboratorio
- anodizzata blu
- autoclavabile

Confezione: 2 pezzi

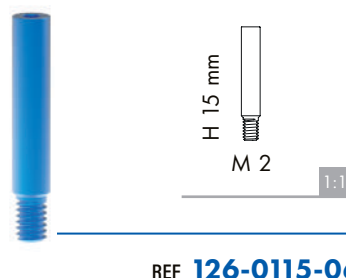

VITI DI CONNESSIONE PER MONCONI MUA

- fabbricate in titanio grado medicale 5
- per fissare la protesi ai monconi MUA
- anodizzate blu
- autoclavabili

Confezione: 1 pezzo

Strumenti necessari:

- raccordo per viti corto o lungo con l'avvitatore manuale protesico o con il cricchetto dinamometrico protesico
- in alternativa avvitatore per manipolo



NOTA BENE:

- Le viti di connessione e i cilindri per monconi MUA sono stati ottimizzati rispetto alle versioni presenti nei precedenti cataloghi.
- Tutti gli attuali accessori **sono compatibili** con i monconi per protesi avvitata precedenti.
- Le attuali viti di connessione **anodizzate blu NON sono compatibili** con le cappette calcinabili e le cappette in titanio del Catalogo Leone 2015 e precedenti.
- Le viti di connessione **non anodizzate** del Catalogo Leone 2015 e precedenti **NON sono compatibili** con gli attuali cilindri per monconi MUA.
- Per casi già protesizzati rimangono disponibili le viti di connessione e le cappette in titanio presenti nel Catalogo Leone 2015 e precedenti.

